

# ReSound Fernbedienung



## Produktbeschreibung

Die ReSound Fernbedienung ist die ideale Lösung für Kunden, die Wert auf eine einfache und diskrete Kontrolle ihrer Hörsysteme legen.

Mit der Fernbedienung können sie Programme wechseln und die Lautstärke anpassen, ohne auf das Gerät schauen zu müssen. Möglich macht dies ein einfaches Bedienfeld mit großen Tasten, die konkav, fühlbar und ergonomisch gestaltet sind. Durch die mittig geprägten Symbole sind sie einfach zu ertasten. Dies ist besonders hilfreich für Anwender mit eingeschränkter Fingerfertigkeit.

Die ReSound Fernbedienung ist klein und handlich mit einem reduzierten, eleganten Design. Sie passt problemlos in eine Hand- oder Hosentasche und liegt gut in der Hand, ähnlich wie ein Autoschlüssel. Das Design ist dezent und unauffällig.

### EINFACHE VERBINDUNG

- Zum Koppeln mit einem Hörsystem müssen Sie nur die Kopplungstaste auf der Rückseite der ReSound Fernbedienung drücken und innerhalb von 20 Sekunden das Batteriefach am Hörsystems öffnen und schließen.

### BENUTZERFREUNDLICH

- Sie können die Programme in Ihrem Hörsystem ganz einfach durch Drücken auf die Programmtaste wechseln.
- Die Lautstärke Ihrer Hörsysteme können Sie mit der Plus- oder Minus-Taste anpassen.
- Die handelsübliche CR2032-Lithium-Knopfzelle lässt sich im Handumdrehen austauschen.

### TECHNISCHE DATEN

Maße	73 x 35 x 14 mm
Gewicht	22,5 g
Ladegerät	CR2032-Lithium-Knopfzelle
Funk-Verbindungen	2 Hörsysteme pro Fernbedienung
Funk-Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Funkreichweite	Ungefähr eine Armlänge
Kommunikationsgeschwindigkeit	2 Mbit/s
Emission	Max. +4 dBm – erfüllt alle relevanten Standards
ESD-Toleranz	+/- 4 kV Kontaktentladung +/- 8 kV Luftentladung
Betriebstemperatur	0 to +55 °C / +32 to +131 °F
Aufbewahrungstemperatur	-20 to +60 °C / -4 to +140 °F

#### Weltweite Vertretungen

GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dänemark  
Tel.: +45 4575 1111  
resound.com

USt-IdNr. DK55082715

#### Deutschland

GN Hearing GmbH  
An der Kleimannbrücke 75  
DE-48157 Münster  
Tel.: +49 251-20 39 6-0  
Fax: +49 251-20 39 6-250  
info@gnresound.de  
resound.com

#### Österreich

GN Hearing Austria GmbH  
Wimberggasse 14-16  
AT-1070 Wien  
Tel.: +43 1 524 54 000  
info@gnresound.at  
resound.at

#### Schweiz

GN Hearing Switzerland AG  
Schützenstrasse 1  
CH-8800 Thalwil  
Tel.: +41 44 722 91 11  
info@gnresound.ch  
resound.ch