

Gebrauchsanweisung



B M 7, B P 7

Made for
 iPhone | iPad | iPod

Inhalt

Herzlich willkommen	4
Ihre Hörsysteme	5
Art der Hörsysteme	5
Lernen Sie Ihre Hörsysteme kennen	6
Bestandteile und Namen	6
Bedienelemente	8
Hörprogramme	9
Einstellungen	9
Batterien	10
Batteriegröße und Tipps zur Handhabung	10
Batterien auswechseln	10
Manipulationssichere Funktion (optional)	11
Täglicher Einsatz	13
Ein- und ausschalten	13
Standby-Modus	14
Einsetzen und Entnehmen des Hörsystems	15
Lautstärke einstellen	17
Hörprogramm wechseln	18
Zusätzliche Einstellungen (optional)	18
Besondere Hörsituationen	19
Telefonieren	19
Audiostreaming	19
Audiostreaming mit iPhone	20

Audiostreaming mit Android-Telefon	20
Bluetooth	20
Induktive Höranlagen	21
Wartung und Pflege	22
<hr/>	
Hörsysteme	22
Ohrstücke und Schläuche	23
Professionelle Wartung	26
Weitere Informationen	27
<hr/>	
Sicherheitshinweise	27
Zubehör	27
Erklärung der Symbole	27
Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen	28
Problembehandlung	29
Landesspezifische Informationen	30
Service und Gewährleistung	35

HERZLICH WILLKOMMEN

Danke, dass Sie sich für unsere Hörsysteme als Ihren Begleiter im Alltag entschieden haben. Wie bei allen neuen Geräten kann es ein wenig dauern, bis Sie mit den Hörsystemen vertraut sind.

Mit Hilfe dieser Anleitung und der Unterstützung Ihres Hörakustikers werden Sie die Vorzüge und die höhere Lebensqualität zu schätzen wissen, die Ihnen Ihre Hörsysteme bieten.

Damit Sie den größten Nutzen aus Ihren Hörsystemen ziehen können, wird empfohlen, dass Sie die Hörsysteme täglich und den ganzen Tag über tragen. Dies hilft Ihnen dabei, sich an Ihre neuen Hörsysteme zu gewöhnen.



VORSICHT

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsanweisung und das Sicherheitshandbuch sorgfältig und vollständig lesen. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um Sachschäden und Verletzungen zu vermeiden.



Möglicherweise sieht das Gerät nicht genau so aus, wie auf den erläuternden Abbildungen in dieser Anleitung. Wir behalten uns das Recht vor, alle Änderungen vorzunehmen, die wir für notwendig halten.

IHRE HÖRSYSTEME



Diese Gebrauchsanweisung beschreibt optionale Funktionen, die Ihre Hörsysteme möglicherweise nicht haben.

Bitte Sie Ihren Hörakustiker, die Funktionen Ihrer Hörsysteme zu markieren.

Art der Hörsysteme

Ihre Hörsysteme sind BTE (Behind-The-Ear)-Modelle. Ein Schlauch leitet den Ton vom Hörsystem ins Ohr. Die Hörsysteme sind nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt oder für Personen, deren Entwicklungsalter unter 3 Jahren liegt.

Die drahtlose Funktionalität ermöglicht fortschrittliche audiologische Funktionen und Synchronisierung Ihrer beiden Hörsysteme.

Ihre Hörsysteme verfügen über Bluetooth® Low Energy* Technologie. Diese ermöglicht einen einfachen Datenaustausch mit Ihrem Smartphone sowie nahtlose Audioübertragung auf Ihr iPhone** sowie auf manche Android-Smartphones, die Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA, Audioübertragung für Hörsysteme) unterstützen.

* Die Bluetooth Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch WS Audiology Denmark A/S in Verbindung mit dem Produkt unterliegt einer Lizenzvereinbarung. Andere ausgewiesene Markennamen und Handelsmarken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

** iPad, iPhone und iPod touch sind Handelsmarken von Apple Inc., registriert in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Beachten Sie, dass Bluetooth nicht in allen Leistungsstufen verfügbar ist.

Lernen Sie Ihre Hörsysteme kennen


Machen Sie sich zuerst mit Ihren neuen Hörsystemen vertraut. Nehmen Sie die Hörsysteme in die Hand, drücken Sie die Bedienelemente und merken Sie sich deren Lage auf dem Hörsystem. Wenn Sie die Hörsysteme später tragen, fällt es Ihnen leichter, die Bedienelemente zu ertasten und zu drücken.

i

Wenn es Ihnen Schwierigkeiten bereitet, die Bedienelemente während des Tragens der Hörsysteme zu drücken, können Sie Ihren Hörakustiker fragen, ob eine Fernbedienung oder eine Smartphone App zur Steuerung Ihrer Hörsysteme verfügbar ist.

Bestandteile und Namen

Ihre Hörsysteme sind entweder mit einem Tragehaken und einem individuell gefertigten Ohrpassstück verbunden, oder mit einem Standardschlauch und einem Standard-Ohrstück.

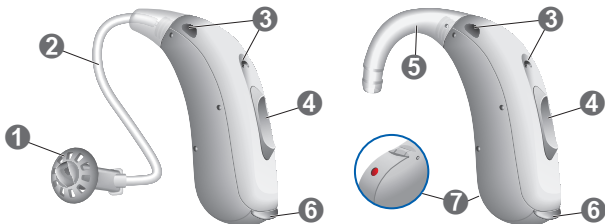




-
- | | |
|---------------------|---|
| ❶ Ohrstück | ❺ Tragehaken |
| ❷ Schlauch | ❻ Batteriefach (Ein-/
Ausschalter) |
| ❸ Mikrofonöffnungen | ❼ Seitenanzeige
(rot = rechts, blau = links) |
| ❹ Wipptaster | |
-

Sie können Standard-Ohrstücke zusammen mit einem Standardschlauch oder individuell gefertigten Ohrpaspstücke zusammen mit einem Tragehaken und einem Schlauch verwenden.

Die Standard-Ohrstücke können Sie leicht auswechseln und den Standardschlauch reinigen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Wartung und Pflege“.

Sie können die folgenden Standard-Ohrstücke verwenden:

Standard-Ohrstücke	Größe
<input type="radio"/> 	Sleeve 3.0 Vented/Closed/Power
<input type="radio"/> 	Eartip 3.0 Open
<input type="radio"/> 	Eartip 3.0 Tulip

Die Standard-Ohrstücke können Sie leicht auswechseln. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Wartung und Pflege“.

Maßgefertigte Ohrstücke



Ohrpassstück (Earmold) 3.0

Bedienelemente

Mit dem Wipptaster können Sie beispielsweise das Hörprogramm einstellen. Ihr Hörakustiker hat den Wipptaster mit Ihren gewünschten Funktionen programmiert.

Wipptaster-Funktion	L	R
Kurz drücken:		
Nächstes / vorheriges Hörprogramm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lauter / leiser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus-Therapie-Signal lauter/leiser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV-Stream an/aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Etwa 2 Sekunden lang drücken:		
Nächstes / vorheriges Hörprogramm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lauter / leiser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus-Therapie-Signal lauter/leiser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV-Stream an/aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = Links, R = Rechts



Sie können auch eine Fernbedienung verwenden, um Hörprogramme zu wechseln oder die Lautstärke Ihrer Hörsysteme einzustellen. Mit unserer Smartphone App haben Sie noch mehr Bedienmöglichkeiten.

Hörprogramme

1

2

3

4

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Hörprogramm wechseln“.

Einstellungen



Die **Tinnitus-Therapie-Signal** erzeugt ein Geräusch, um Sie von Ihrem Tinnitus abzulenken.



Mit der eingebauten **Telefonspule** kann sich Ihr Hörsystem mit induktiven Höranlagen verbinden. Lesen Sie mehr im Kapitel "Induktive Höranlagen".

BATTERIEN

Wenn die Batterie schwach ist, wird das Hörsystem leiser oder ein Warnsignal ertönt. Es hängt vom Batterietyp ab, wie viel Zeit Sie haben, um die Batterie zu wechseln.

Batteriegröße und Tipps zur Handhabung

Fragen Sie Ihren Hörakustiker nach geeigneten Batterien.

Batteriegröße:


13

- Verwenden Sie immer die richtige Batteriegröße für Ihre Hörsysteme.
- Wenn Sie vorhaben, die Hörsysteme mehrere Tage nicht zu nutzen, entnehmen Sie die Batterien.
- Tragen Sie immer Ersatzbatterien bei sich.
- Entnehmen Sie leere Batterien unverzüglich und befolgen Sie die lokalen Vorschriften zur Batterieentsorgung.


Batterien auswechseln

Batterie entnehmen:

- ▶ Öffnen Sie das Batteriefach.

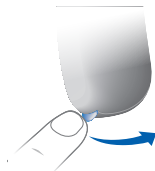

- ▶ Verwenden Sie den Magnetstift, um die Batterie zu entnehmen. Der Magnetstift ist als Zubehör erhältlich.

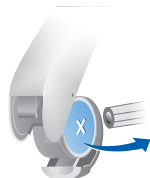

Batterie einsetzen:

- ▶ Wenn die Batterie eine Schutzfolie hat, entfernen Sie die Schutzfolie kurz bevor Sie die Batterie einsetzen wollen.



- ▶ Legen Sie die Batterie mit dem „+“ Symbol nach oben in das Batteriefach ein (siehe Abbildung). Beachten Sie: Legen Sie die Batterie nicht direkt in das Gehäuse ein.



- ▶ Schließen Sie das Batteriefach sorgfältig, da es beschädigt werden kann.
Drücken Sie nur in einem geraden Winkel und in dem in der Abbildung hervorgehobenen Bereich. Wenden Sie keine Gewalt an.



Wenn Sie dabei einen Widerstand spüren, ist die Batterie nicht richtig eingelegt.

Manipulationssichere Funktion (optional)

Bitte Sie Ihren Hörakustiker, die manipulationssichere Funktion zu aktivieren.

AUS-Position bei Nichtgebrauch


- ▶ Das Batteriefach lässt sich leicht um einige Millimeter öffnen, um das Hörsystem auszuschalten.

Um sicherzustellen, dass das Hörsystem in der Nähe von Kleinkindern sicher aufbewahrt wird, muss das Batteriefach in die AUS-Position geöffnet werden, wenn das Hörsystem nicht benutzt wird.

- i** Öffnen Sie das Batteriefach nur vollständig, wenn Sie die Batterie wechseln.

So öffnen Sie das Batteriefach:

- ▶ Legen Sie ein kleines Tuch oder Papiertuch über den Griff des Batteriefachs.
- ▶ Öffnen Sie die Klappe mit dem Daumen wie in der Abbildung gezeigt.

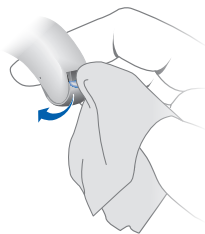

- i** Die zum Öffnen der Klappe erforderliche Kraft ist höher als jene für die nicht manipulationssichere Einstellung.

TÄGLICHER EINSATZ

Um eine bequeme und einfache Verwendung Ihrer Hörsysteme sicherzustellen, verfügen diese über ein integriertes Bedienelement.

Zusätzlich bieten wir eine App für Android und iOS an, mit der die Handhabung Ihrer Hörsysteme noch einfacher gestaltet wird. Kontaktieren Sie Ihren Hörakustiker, um die Smartphone App herunterzuladen und zu installieren.

Ein- und ausschalten

Sie können Ihre Hörsysteme über das Batteriefach ein- und ausschalten:

- ▶ Einschalten: Schließen Sie das Batteriefach.

Standard-Lautstärke und **-Hörprogramm** sind eingestellt.

- ▶ Ausschalten: Öffnen Sie das Batteriefach bis zum ersten Widerstand.

Wenn die **Einschaltverzögerung** aktiviert

ist, schalten sich die Hörsysteme erst nach einigen Sekunden ein. In dieser Zeit können Sie die Hörsysteme ohne unangenehmes Pfeifgeräusch in Ihre Ohren einsetzen.

Die Einschaltverzögerung kann von Ihrem Hörakustiker aktiviert werden.



Standby-Modus

Der Standby-Modus schaltet die Hörsysteme stumm. Sie sind nicht vollständig abgeschaltet, sondern verbrauchen noch etwas Strom. Deshalb empfehlen wir, nur für kurze Zeit in den Standby-Modus zu wechseln.

So wechseln Sie in den Standby-Modus:

- mit der Fernbedienung
- mit dem Wipptaster.

Halten Sie den Wipptaster einige Sekunden lang gedrückt.

Den Standby-Modus verlassen:

- Die Lautstärke und das Hörprogramm bleiben so, wie sie zuletzt eingestellt waren.
- Wenn Sie den Standby-Modus verlassen möchten, aber die Fernbedienung nicht zur Hand ist, schalten Sie Ihr Gerät aus und wieder ein (durch Öffnen und Schließen des Batteriefachs). In diesem Fall sind Standard-Lautstärke und -Hörprogramm eingestellt.

Einsetzen und Entnehmen des Hörsystems


Ihre Hörsysteme wurden speziell für Ihr linkes und Ihr rechtes Ohr angepasst. An farbigen Markierungen erkennen Sie, für welches Ohr das jeweilige Gerät vorgesehen ist:

- rote Markierung = rechtes Ohr
- blaue Markierung = linkes Ohr



Hörsystem einsetzen:

- ▶ Halten Sie den Schlauch dicht am Ohrstück.
- ▶ Schieben Sie das Ohrstück vorsichtig in den Gehörgang ❶.
- ▶ Drehen Sie es leicht, bis es gut sitzt.
Öffnen und schließen Sie Ihren Mund, um Lufteinschlüsse im Gehörgang zu vermeiden.
- ▶ Heben Sie das Hörsystem an und schieben Sie es über Ihre Ohrmuschel ❷.

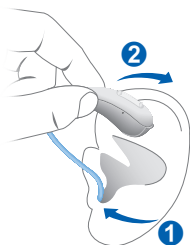

i

- Es kann hilfreich sein, das **rechte** Hörsystem mit der **rechten** Hand und das **linke** Hörsystem mit der **linken** Hand einzusetzen.
- Wenn Ihnen das Einsetzen des Ohrstücks schwerfällt, ziehen Sie Ihr Ohrläppchen mit der anderen Hand nach unten. Dadurch wird der Gehörgang geöffnet und das Ohrstück lässt sich leichter einsetzen.




VORSICHT

Verletzungsgefahr!

- ▶ Setzen Sie das Ohrstück vorsichtig und nicht zu tief in das Ohr ein.


Die optionale Concha-Abstützung hilft, den Sitz des Ohrstücks im Ohr zu verbessern. Um die Concha-Abstützung zu positionieren:

- ▶ Biegen Sie die Concha-Abstützung und legen Sie diese vorsichtig unten in die Ohrmuschel (siehe Bild).

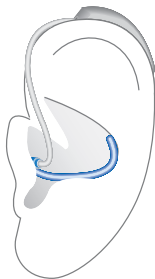

Hörsystem herausnehmen:

- ▶ Heben Sie das Hörsystem an und schieben Sie es über Ihre Ohrmuschel ❶.
- ▶ Halten Sie den Schlauch nahe an das Ohrstück und ziehen Sie das Ohrstück vorsichtig heraus ❷.

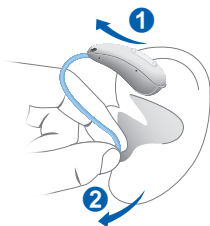

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

- ▶ In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Ohrstück im Ohr verbleibt, wenn Sie das Hörsystem entnehmen. Lassen Sie das Ohrstück in diesem Fall von einer medizinischen Fachkraft entfernen.

Reinigen und trocknen Sie Ihre Hörsysteme nach dem Tragen. Lesen Sie mehr im Kapitel „Wartung und Pflege“.

Lautstärke einstellen

Ihre Hörsysteme passen die Lautstärke automatisch an die Hörsituation an.

- ▶ Wenn Sie die Lautstärke manuell einstellen möchten, drücken Sie den oberen Teil des Wipptasters, um die Lautstärke zu erhöhen, oder den unteren Teil, um die Lautstärke zu verringern.

Schlagen Sie im Kapitel "Bedienelemente" die Einstellungen Ihres Wipptasters nach.

Auf Wunsch kann ein Signal bei Veränderung der Lautstärke ertönen. Wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht ist, kann auf Wunsch ebenfalls ein Signal ertönen.

Hörprogramm wechseln

Ihre Hörsysteme passen den Klangcharakter automatisch an die jeweilige Hörsituation an.

Ihre Hörsysteme können auch mehrere Hörprogramme haben womit Sie den Klangcharakter bei Bedarf selbst verändern können. Auf Wunsch kann ein Signal beim Wechsel des Hörprogramms ertönen.

- ▶ Um das Hörprogramm zu wechseln, drücken Sie kurz den Wipptaster.

Schlagen Sie im Kapitel "Bedienelemente" Ihre Einstellungen des Wipptasters nach. Im Kapitel "Bedienelemente" finden Sie eine Liste Ihrer Hörprogramme.

Die Standard-Lautstärke wird verwendet.

Zusätzliche Einstellungen (optional)


Mit den Bedienelementen Ihrer Hörsysteme können Sie auch andere Einstellungen vornehmen, beispielsweise die Lautstärke der Tinnitus-Therapie-Signal einstellen.

Schlagen Sie im Kapitel "Bedienelemente" Ihre Einstellungen der Bedienelemente nach.

BESONDERE HÖRSITUATIONEN

Telefonieren

Halten Sie beim Telefonieren den Telefonhörer etwas höher als gewöhnlich. Der Telefonhörer muss auf das Hörsystem ausgerichtet sein. Drehen Sie den Telefonhörer etwas, sodass das Ohr nicht vollständig vom Telefonhörer verdeckt wird.

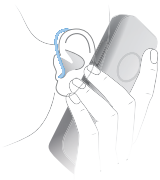

Telefonprogramm

Wenn Sie beim Telefonieren eine bestimmte Lautstärkeinstellung bevorzugen, bitten Sie Ihren Hörakustiker, ein spezielles Telefonprogramm einzurichten.

- Wechseln Sie in das Telefonprogramm, wenn Sie telefonieren.

Wenn für Ihre Hörsysteme ein Telefonprogramm eingerichtet wurde, ist dies im Kapitel "Hörprogramme" angegeben.

Audiostreaming

Die folgenden Informationen zum Audiostreaming gelten **nicht** für alle Modelle des Hörsystems. Bitten Sie Ihren Hörakustiker, die Funktionen Ihrer Hörsysteme zu markieren.

Audiostreaming mit iPhone

Ihre Hörsysteme sind Made for iPhone Hörsysteme. Das bedeutet, dass Sie Telefonanrufe oder Musik von Ihrem iPhone direkt in Ihre Hörsysteme übertragen können.

Für Informationen über kompatible iOS-Geräte, zum Pairing, zur Audioübertragung und zu weiteren nützlichen Funktionen fragen Sie Ihren Hörakustiker.

Audiostreaming mit Android-Telefon

Unterstützt Ihr Mobiltelefon Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) können Sie Telefonanrufe oder Musik von Ihrem iPhone direkt in Ihre Hörsysteme übertragen.

Weiterführende Informationen über die kompatiblen Android-Geräte, zum Pairing, zur Audioübertragung und zu weiteren nützlichen Funktionen erhalten Sie von Ihrem Hörakustiker.

Bluetooth

Ihr Gerät ist mit Bluetooth®* drahtloser Technologie ausgestattet, die eine einfache Audioübertragung von Handys oder anderen kompatiblen Geräten ermöglicht.

Im Flugzeug ist die Nutzung der Bluetooth -Funktion möglicherweise eingeschränkt, insbesondere beim Start und bei der Landung. Sollte dies der Fall sein, können Sie die drahtlose Bluetooth -Technologie in Ihrem Gerät über die Smartphone App ausschalten.

* Die Bluetooth Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch WS Audiology Denmark A/S in Verbindung mit dem Produkt unterliegt einer Lizenzvereinbarung. Andere ausgewiesene Markennamen und Handelsmarken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Induktive Höranlagen

Manche Telefone und öffentlichen Einrichtungen, wie etwa Theater, nutzen eine Induktionsschleife bzw. eine induktive Höranlage, um das gewünschte Audiosignal (Musik und Sprache) zu übertragen. Mit diesem System können Ihre Hörsysteme das gewünschte Signal direkt empfangen – ohne störende Geräusche aus der Umgebung.

Gewöhnlich wird auf induktive Höranlagen durch Schilder oder Symbole hingewiesen.



Wenn Sie an einem Ort mit induktiver Höranlage sind:

- ▶ Wechseln Sie in das Telefonspulenprogramm.

Wenn für Ihre Hörsysteme ein Telefonspulenprogramm eingerichtet wurde, ist dieses im Abschnitt „Hörprogramme“ aufgeführt.

WARTUNG UND PFLEGE

Um Schäden zu vermeiden ist es wichtig, dass Sie Ihre Hörsysteme pfleglich behandeln und einige Grundregeln beachten, die Ihnen schnell zur täglichen Gewohnheit werden.

Hörsysteme

Trocknen und Aufbewahren

- ▶ Trocknen Sie Ihre Hörsysteme über Nacht.
- ▶ Wenn Sie die Hörsysteme längere Zeit nicht tragen, lagern Sie diese mit geöffnetem Batteriefach und entfernten Batterien in einer trockenen Umgebung.
- ▶ Bitten Sie Ihren Hörakustiker um weitere Informationen.

Reinigen

Ihre Hörsysteme haben eine Schutzbeschichtung. Sie müssen Ihre Hörsysteme trotzdem regelmäßig reinigen, um eine Beschädigung der Hörsysteme und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.

- ▶ Reinigen Sie Ihre Hörsysteme täglich mit einem weichen, trockenen Papiertuch.
- ▶ Verwenden Sie nie fließendes Wasser und tauchen Sie die Geräte nicht in Wasser.
- ▶ Üben Sie beim Reinigen niemals Druck aus.



- ▶ Fragen Sie Ihren Hörakustiker nach Empfehlungen für Reinigungsmittel und Pflegezubehör sowie weiteren Informationen, um Ihre Hörsysteme in gutem Zustand zu halten.


Ohrstücke und Schläuche

Auf den Ohrstücken kann sich Cerumen (Ohrenschmalz) ansammeln. Dadurch kann die Klangqualität beeinträchtigt werden.

- Für Hörsysteme mit einem Standardschlauch:
Reinigen Sie die Außenseite der Schläuche täglich mit einem Papiertuch, um Ablagerungen zu entfernen.
Die Schläuche sollten ausgetauscht werden, wenn Sie eine Beschädigung oder Verfärbung feststellen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol oder scharfe Chemikalien enthalten, da dies die Schläuche beschädigen kann.
- Für Hörsysteme mit einem Tragehaken:
Reinigen Sie die Ohrstücke täglich.
Bitten Sie Ihren Hörakustiker, die Schläuche zu reinigen oder die Ohrstücke und Schläuche bei Bedarf auszutauschen.

Ohrstücke reinigen


- ▶ Reinigen Sie die Ohrstücke täglich mit einem Papiertuch, um angesammeltes Ohrenschmalz zu entfernen. Tauschen Sie die Ohrstücke aus, wenn sie Anzeichen einer Beschädigung aufweisen oder sich nicht mehr zufriedenstellend reinigen lassen.

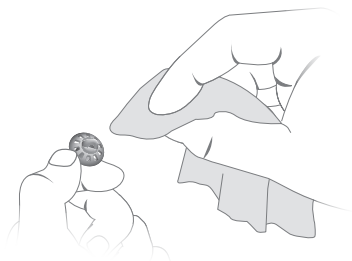

- ▶ Verwenden Sie nie fließendes Wasser und tauchen Sie das Ohrstück nicht in Wasser.

Standard-Ohrstücke auswechseln

- ▶ Ziehen Sie das gebrauchte Ohrstück ab und befestigen Sie das neue Ohrstück.

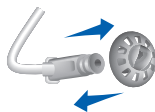



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

- ▶ Tragen Sie den Schlauch immer mit einem Ohrstück.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Ohrstück richtig befestigt ist.

Standard-Schläuche auswechseln

- ▶ Schrauben Sie den gebrauchten Schlauch vom Hörsystem ab.



Schrauben Sie den neuen Schlauch auf.

Professionelle Wartung

Ihr Hörakustiker kann Ihre Hörsysteme gründlich und professionell reinigen und warten.

Maßgefertigte Ohrstücke und Wachsfilter sollten bei Bedarf von Ihrem Hörakustiker ausgewechselt werden.

Fragen Sie Ihren Hörakustiker, welche Wartungsabstände für Sie empfehlenswert sind.

WEITERE INFORMATIONEN

Sicherheitshinweise

Weitere Sicherheitshinweise finden Sie im Sicherheitshandbuch, das im Lieferumfang enthalten ist.

Zubehör

Sie können die smartphone app für die komfortable Bedienung Ihrer Hörsysteme verwenden. Mit der App können Sie auch Signaltöne deaktivieren, Klangprofile abrufen und vieles mehr.

Sie können auch eine Fernbedienung verwenden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.

Erklärung der Symbole



Weist auf eine Situation hin, die zu schweren, mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.



Weist auf mögliche Sachschäden hin.



Ratschläge, Tipps und nützliche Informationen.



CE-Konformitätskennzeichnung: Bestätigt die Übereinstimmung mit bestimmten Europäischen Richtlinien. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Konformitätsinformationen“.



Zeigt den Hersteller des Gerätes an.

Made for



iPhone | iPad | iPod

"Made for iPhone", "Made for iPad", und "Made for iPod" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit iPhone, iPad, oder iPod jeweils entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Gerätes oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit iPhone, iPad, oder iPod die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen

Betriebsbedingungen

Temperatur

0 bis 50 °C
32 bis 122 °F

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 93 %

Während Transport und Lagerung sollten folgende Wertebereiche nicht für längere Zeit verlassen werden:

	Lagerung	Transport
Temperatur	10 bis 40 °C 50 bis 104 °F	-20 bis 60 °C -4 bis 140 °F
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 80 %	5 bis 90 %

Für andere Teile, z. B. für Batterien, können andere Werte gelten.

Problembehandlung

Problem und Lösungsmöglichkeiten

Der Ton ist schwach.

- Erhöhen Sie die Lautstärke.
 - Wechseln Sie die leere Batterie aus.
 - Reinigen Sie das Ohrstück oder wechseln Sie es aus.
-

Aus dem Hörsystem ertönen Pfeiftöne.

- Setzen Sie das Ohrstück erneut ein, bis es fest sitzt.
 - Verringern Sie die Lautstärke.
 - Reinigen Sie das Ohrstück oder wechseln Sie es aus.
-

Der Ton ist verzerrt.

Problem und Lösungsmöglichkeiten

- Verringern Sie die Lautstärke.
- Wechseln Sie die leere Batterie aus.
- Reinigen Sie das Ohrstück oder wechseln Sie es aus.

Signaltöne ertönen aus dem Hörsystem

- Wechseln Sie die leere Batterie aus.

Hörsystem funktioniert nicht.

- Schalten Sie das Hörsystem ein.
- Schließen Sie das Batteriefach vorsichtig und vollständig.
- Wechseln Sie die leere Batterie aus.
- Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt wurde.
- Die Einschaltverzögerung ist aktiviert. Warten Sie einige Sekunden und prüfen Sie erneut.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.

Landesspezifische Informationen

USA und Kanada

Information zur Zertifizierung der Hörsysteme mit drahtloser Funktionalität:

B M 7

- HVIN: RFM007
- Enthält FCC ID: 2AXDT-RFM007
- Enthält IC: 26428-RFM007

B P 7

- HVIN: RFM006
- Enthält FCC ID: 2AXDT-RFM006
- Enthält IC: 26428-RFM006

Service und Gewährleistung

Seriennummern

Links:

Rechts:

Service-Termine

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Gewährleistung

Kaufdatum:

Gewährleistungsdauer in Monaten:

Ihr Hörakustiker



WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngø
Dänemark

Audio Service ist eine Marke von WSAUD A/S

Document No. 05293-99T01-0000 DE
Order/Item No. 210 255 93
Master Rev 01, 11.2022
© 12.2022, WSAUD A/S. All rights reserved

www.audioservice.com

