

# GEBRAUCHSANWEISUNG HdO – HÖRSYSTEME

## DUO G5 P G5

Made for

 iPhone | iPad | iPod

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Willkommen</b>	<b>4</b>
<b>Ihre Hörsysteme</b>	<b>5</b>
Art der Hörsysteme	5
Lernen Sie Ihre Hörsysteme kennen	6
Bestandteile und Namen	7
Bedienelemente	10
Hörprogramme	11
Einstellungen	12
<b>Batterien</b>	<b>13</b>
Batteriegröße und Tipps zur Handhabung	13
Batterien austauschen	13
<b>Täglicher Einsatz</b>	<b>15</b>
Ein- und ausschalten	15
Hörsysteme einsetzen und herausnehmen	16
Lautstärke einstellen	19
Hörprogramm wechseln	20
Zusätzliche Einstellungen (optional)	20
<b>Besondere Hörsituationen</b>	<b>21</b>
Telefonieren	21
Audioübertragung mit dem iPhone, iPad oder iPod	22
Flugzeugmodus	22
Induktive Höranlagen (optional)	23

<b>Wartung und Pflege</b>	<b>25</b>
Hörsysteme	25
Ohrstücke, Tragehaken und Schläuche	26
Professionelle Wartung	31
<b>Weitere Informationen</b>	<b>32</b>
Sicherheitshinweise	32
Zubehör	32
Symbole in diesem Dokument	32
Problembehandlung	33
Service und Garantie	35

## WILLKOMMEN

Danke, dass Sie sich für unsere Hörsysteme entschieden haben. Wie bei allen neuen Geräten kann es ein wenig dauern, bis Sie mit den Hörsystemen vertraut sind.

Mit Hilfe dieser Anleitung und der Unterstützung Ihres Hörakustikers werden Sie die Vorzüge und die höhere Lebensqualität zu schätzen wissen, die Ihnen Ihre Hörsysteme bieten.

Damit Sie den größten Nutzen aus Ihren Hörsystemen ziehen können, wird empfohlen, dass Sie die Hörsysteme täglich und den ganzen Tag über tragen. Dies hilft Ihnen dabei, sich an Ihre neuen Hörsysteme zu gewöhnen.



### VORSICHT

Es ist wichtig, dass Sie diese Bedienungsanleitung und das Sicherheitshandbuch sorgfältig und vollständig lesen. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um Sachschäden oder Verletzungen zu vermeiden.

## IHRE HÖRSYSTEME



Diese Bedienungsanleitung beschreibt optionale Funktionen, die Ihre Hörsysteme möglicherweise nicht alle haben.

Bitte Sie Ihren Hörakustiker, die Funktionen Ihrer Hörsysteme zu markieren.

## ART DER HÖRSYSTEME

Ihre Hörsysteme sind BTE-Hörsysteme ("Behind-The-Ear"). Ein Schlauch leitet den Klang vom Hörsystem in das Ohr. Die Hörsysteme sind nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt und nicht für Personen, deren Entwicklungsalter unter 3 Jahren liegt.

Die drahtlose Funktionalität ermöglicht fortschrittliche audilogische Funktionen und die Synchronisierung Ihrer beiden Hörsysteme.

Ihre Hörsysteme sind mit der *Bluetooth*® low energy\* Technologie ausgestattet. Diese ermöglicht einfache Datenübertragung mit Ihrem Smartphone sowie nahtlose Audioübertragung mit Ihrem iPhone, iPad oder iPod \*\*.

\* Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch den Hersteller dieses Produktes unterliegt einer Lizenzvereinbarung. Andere ausgewiesene Markennamen und Handelsmarken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

\*\* iPhone, iPad und iPod sind Markenzeichen von Apple Inc., registriert in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

## LERNEN SIE IHRE HÖRSYSTEME KENNEN

Machen Sie sich zuerst mit Ihren neuen Hörsystemen vertraut. Nehmen Sie die Hörsysteme in die Hand, drücken Sie die Bedienelemente und merken Sie sich deren Lage auf dem Hörsystem. Wenn Sie die Hörsysteme später tragen, fällt es Ihnen leichter, die Bedienelemente zu ertasten und zu drücken.


**i** Wenn es Ihnen Schwierigkeiten bereitet, die Bedienelemente während des Tragens der Hörsysteme zu drücken, können Sie eine Fernbedienung verwenden. Mit einer speziellen Smartphone App haben Sie noch mehr Bedienmöglichkeiten.

## BESTANDTEILE UND NAMEN

Diese Bedienungsanleitung beschreibt unterschiedliche Hörsysteme. Mit Hilfe der nachfolgenden Bilder können Sie erkennen, welche Hörsysteme Sie nutzen.


Ihre Hörsysteme haben entweder einen Tragehaken und ein individuell gefertigtes Ohrstück oder einen Standard-Schlauch (Thin Tube) und ein Standard-Ohrstück (Open Tip).

### DUO G5

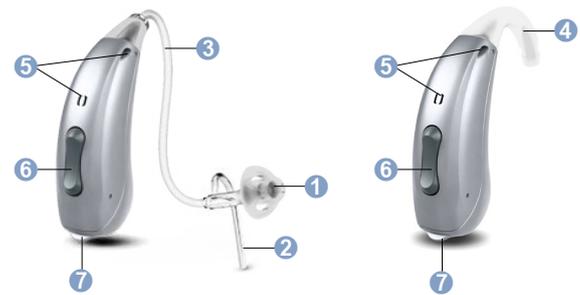

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Ohrstück (Open Tip)          | 5 Mikrofonöffnungen               |
| 2 Concha-Abstützung (optional) | 6 Wipptaster (Bedienelement)      |
| 3 Schlauch (Thin Tube)         | 7 Batteriefach (Ein-/Ausschalter) |
| 4 Tragehaken                   |                                   |

P G5

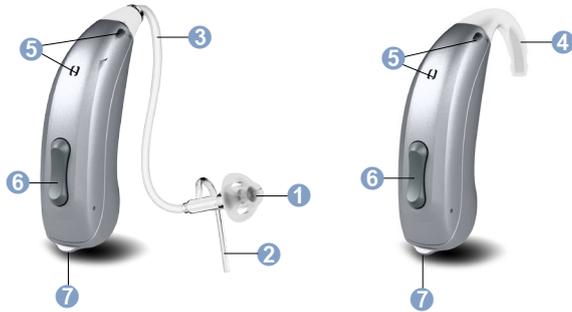

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Ohrstück (Open Tip)          | 5 Mikrofonöffnungen               |
| 2 Concha-Abstützung (optional) | 6 Wipptaster (Bedienelement)      |
| 3 Schlauch (Thin Tube)         | 7 Batteriefach (Ein-/Ausschalter) |
| 4 Tragehaken                   |                                   |

Sie können Standard-Ohrstücke zusammen mit einem Standard-Schlauch verwenden oder individuell gefertigte Ohrstücke mit einem Tragehaken und einem Schlauch.

Standard-Ohrstücke können Sie leicht auswechseln und Standard-Schläuche sind einfach zu reinigen. Lesen Sie mehr im Kapitel "Wartung und Pflege".

Standard-Ohrstücke/-Schläuche	Größe
-------------------------------	-------

<input type="checkbox"/>	 Open Tip
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	 Bass Tip
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	Thin Tube
--------------------------	-----------


Individuell gefertigte Ohrstücke
----------------------------------

<input type="checkbox"/> Beispiele:
-------------------------------------



## BEDIENELEMENTE

Mit dem Wipptaster können Sie beispielsweise die Lautstärke oder das Hörprogramm einstellen. Ihr Hörakustiker hat den Wipptaster mit Ihren gewünschten Funktionen programmiert.

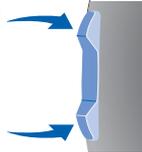

Wipptaster Funktion	L	R
Kurz drücken:		
Nächstes / vorheriges Hörprogramm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lauter / leiser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tinnitus-Therapie-Signal lauter / leiser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TV-Stream an/aus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etwa 2 Sekunden lang drücken:		
Nächstes / vorheriges Hörprogramm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lauter / leiser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tinnitus-Therapie-Signal lauter / leiser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TV-Stream an/aus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Länger als 3 Sekunden drücken:		
Standby / einschalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flugzeugmodus aktivieren / deaktivieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L = Links, R = Rechts



Sie können auch eine Fernbedienung verwenden, um Hörprogramme zu wechseln oder die Lautstärke der Hörsysteme einzustellen. Mit unserer Smartphone App haben Sie noch mehr Bedienmöglichkeiten.

## HÖRPROGRAMME

1

2

3

4

5

6

Lesen Sie mehr im Kapitel "Hörprogramm wechseln".

## EINSTELLUNGEN

- Mit aktivierter **Einschaltverzögerung** können Sie die Hörsysteme ohne unangenehmes Pfeifgeräusch einsetzen.

Lesen Sie mehr im Kapitel "Ein- und ausschalten".

- Die **Tinnitus-Therapie-Funktion** erzeugt ein Geräusch, um Sie von Ihrem Tinnitus abzulenken.

- Im Batteriefach ist eine **Telefonspule** integriert. Damit kann sich Ihr Hörsystem mit induktiven Höranlagen verbinden.

Lesen Sie mehr im Kapitel "Induktive Höranlagen".

## BATTERIEN

Wenn die Batterie schwach ist, wird das Hörsystem leiser oder ein Warnsignal ertönt. Es hängt vom Batterietyp ab, wie viel Zeit Sie haben, um die Batterie zu wechseln.

### BATTERIEGRÖÖE UND TIPPS ZUR HANDHABUNG

Fragen Sie Ihren Hörakustiker nach geeigneten Batterien.

---

Batteriegröße: 13


---

- Verwenden Sie immer die richtige Batteriegröße für Ihre Hörsysteme.
- Wenn Sie vorhaben, die Hörsysteme mehrere Tage nicht zu nutzen, entnehmen Sie die Batterien.
- Tragen Sie immer Ersatzbatterien bei sich.
- Entnehmen Sie leere Batterien unverzüglich und befolgen Sie die lokalen Vorschriften zur Batterieentsorgung.

### BATTERIEN AUSWECHSELN

Batterie entnehmen:

- Öffnen Sie das Batteriefach.

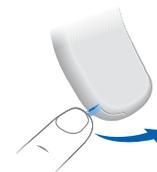

- Verwenden Sie den Magnetstift, um die Batterie zu entnehmen. Der Magnetstift ist als Zubehör erhältlich.



Batterie einsetzen:

- Wenn die Batterie eine Schutzfolie hat, entfernen Sie die Schutzfolie, kurz bevor Sie die Batterie einsetzen wollen.



- Legen Sie die Batterie so ein, dass das "+" Symbol nach oben zeigt (siehe Bild).



- Schließen Sie das Batteriefach vorsichtig. Wenn Sie dabei einen Widerstand spüren, ist die Batterie nicht richtig eingelegt.

Versuchen Sie nicht, das Batteriefach mit Gewalt zu schließen. Es kann dadurch beschädigt werden.

## TÄGLICHER EINSATZ

### EIN- UND AUSSCHALTEN

Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Hörsysteme ein- oder auszuschalten.

Mit dem Batteriefach:

- Einschalten: Schließen Sie das Batteriefach.
- **Standard**-Lautstärke und -Hörprogramm sind eingestellt.
- Ausschalten: Öffnen Sie das Batteriefach bis zum ersten Widerstand.

Mit dem Wipptaster:

- Ein- oder ausschalten: Halten Sie den Wipptaster einige Sekunden lang gedrückt. Schlagen Sie im Kapitel "Bedienelemente" Ihre Einstellung des Wipptasters nach. Nach dem Einschalten bleiben Lautstärke und Hörprogramm so, wie Sie sie **zuletzt eingestellt** hatten.

Beim Ein- oder Ausschalten kann auf Wunsch ein Signal ertönen. Sie hören das Signal nur, wenn Sie die Hörsysteme tragen.

Wenn die **Einschaltverzögerung** aktiviert ist, schalten sich die Hörsysteme erst nach einigen Sekunden ein. In dieser Zeit können Sie die Hörsysteme ohne unangenehmes Pfeifgeräusch in Ihre Ohren einsetzen.

Die Einschaltverzögerung kann von Ihrem Hörakustiker aktiviert werden.

## HÖRSYSTEME EINSETZEN UND HERAUSNEHMEN


Ihre Hörsysteme wurden speziell für Ihr linkes und Ihr rechtes Ohr angepasst. An farbigen Markierungen erkennen Sie, für welches Ohr ein Hörsystem angepasst ist:

- rote Markierung = rechtes Ohr
- blaue Markierung = linkes Ohr



- Halten Sie den Schlauch nahe am Ohrstück.
- Schieben Sie das Ohrstück vorsichtig in den Gehörgang ①.
- Drehen Sie es leicht, bis es gut sitzt.

Öffnen und schließen Sie Ihren Mund, um Lufteinschlüsse im Gehörgang zu vermeiden.

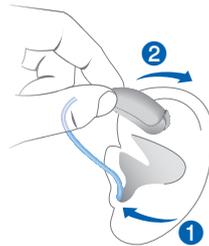

- Heben Sie das Hörsystem an und schieben Sie es über Ihre Ohrmuschel ②.



### VORSICHT

Verletzungsgefahr!

- Setzen Sie das Ohrstück vorsichtig und nicht zu tief in das Ohr ein.



- Es kann hilfreich sein, das **rechte** Hörsystem mit der **rechten** Hand und das **linke** Hörsystem mit der **linken** Hand einzusetzen.
- Wenn Ihnen das Einsetzen des Ohrstücks schwer fällt, ziehen Sie das Ohrfläppchen mit der anderen Hand nach unten. Dadurch wird der Gehörgang geöffnet und das Ohrstück lässt sich leichter einsetzen.


Die optionale Concha-Abstützung hilft, den Sitz des Ohrstücks im Ohr zu verbessern. Um die Concha-Abstützung zu positionieren:

- Biegen Sie die Concha-Abstützung und legen Sie diese vorsichtig unten in die Ohrmuschel (siehe Bild).



Hörssystem herausnehmen:

- Heben Sie das Hörssystem an und schieben Sie es über Ihre Ohrmuschel ①.
- Fassen Sie den Schlauch nahe am Ohrstück und ziehen Sie damit das Ohrstück vorsichtig heraus ②.

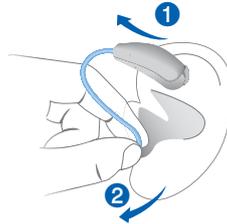

#### **VORSICHT**

Verletzungsgefahr!

- In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Ohrstück im Ohr verbleibt, wenn Sie das Hörssystem entnehmen. Lassen Sie das Ohrstück in diesem Fall von einer medizinischen Fachkraft entfernen.

Reinigen und trocknen Sie Ihre Hörsysteme nach dem Tragen. Lesen Sie mehr im Kapitel "Wartung und Pflege".

## LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Ihre Hörsysteme passen die Lautstärke automatisch an die Hörsituation an.

- Wenn Sie die Lautstärke lieber manuell einstellen, drücken Sie den Wipptaster.
- Schlagen Sie im Kapitel "Bedienelemente" Ihre Einstellungen des Wipptasters nach.

Auf Wunsch kann ein Signal bei Veränderung der Lautstärke ertönen. Wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht ist, kann auf Wunsch ebenfalls ein Signal ertönen.

## BESONDERE HÖRSITUATIONEN

### TELEFONIEREN

Halten Sie beim Telefonieren den Telefonhörer etwas höher als gewöhnlich. Der Telefonhörer muss auf das Hörsystem ausgerichtet sein. Drehen Sie den Telefonhörer etwas, so dass das Ohr nicht vollständig vom Telefonhörer verdeckt wird.



### TELEFONPROGRAMM

Wenn Sie beim Telefonieren eine bestimmte Lautstärkeeinstellung bevorzugen, bitten Sie Ihren Hörakustiker, ein spezielles Telefonprogramm einzurichten.

- Wechseln Sie in das Telefonprogramm, wenn Sie telefonieren.
- Wenn für Ihre Hörsysteme ein Telefonprogramm eingerichtet wurde, ist dies im Kapitel "Hörprogramme" angegeben.

### HÖRPROGRAMM WECHSELN

Ihre Hörsysteme passen den Klangcharakter automatisch an die jeweilige Hörsituation an.

Ihre Hörsysteme können auch mehrere Hörprogramme haben. Mit Hilfe der Hörprogramme verändern Sie den Klangcharakter bei Bedarf selbst. Auf Wunsch kann ein Signal beim Wechsel des Hörprogramms ertönen.

- Um das Hörprogramm zu wechseln, drücken Sie den Wipptaster.

Schlagen Sie im Kapitel "Bedienelemente" Ihre Einstellungen des Wipptasters nach. Im Kapitel "Hörprogramme" finden Sie eine Liste Ihrer Hörprogramme.

Die Standard-Lautstärke wird verwendet.

### ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN (OPTIONAL)

Mit den Bedienelementen Ihrer Hörsysteme können Sie auch andere Einstellungen vornehmen, beispielsweise die Lautstärke des Tinnitus-Therapie-Signals einstellen.

Schlagen Sie im Kapitel "Bedienelemente" Ihre Einstellungen der Bedienelemente nach.

## AUDIOÜBERTRAGUNG MIT DEM iPHONE, iPAD ODER IPOD

Ihre Hörsysteme sind **Made for iPhone | iPad | iPod** Hörsysteme. Das bedeutet, dass Sie Telefonanrufe oder Musik von Ihrem iPhone, iPad oder iPod direkt in Ihre Hörsysteme übertragen können.

Für Informationen über die kompatiblen iOS-Geräte, zum Pairing, zur Audioübertragung und zu weiteren nützlichen Funktionen fragen Sie Ihren Hörakustiker.

## FLUGZEUGMODUS

In Bereichen, in denen die Verwendung der *Bluetooth*® Technologie nicht erlaubt ist (z. B. in manchen Flugzeugen), können Sie den Flugzeugmodus aktivieren. Dieser schaltet *Bluetooth*® in Ihren Hörsystemen vorübergehend aus. Die Hörsysteme funktionieren ohne *Bluetooth*®, aber direkte Audioübertragung ist nicht möglich und weitere Funktionen sind nicht verfügbar.

- Um den Flugzeugmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, verwenden Sie die Smartphone App oder die Bedienelemente Ihrer Hörsysteme.

Im Kapitel "Bedienelemente" finden Sie weitere Informationen.

Ein Signal ertönt, wenn der Flugzeugmodus aktiviert oder deaktiviert wird.

## INDUKTIVE HÖRANLAGEN (OPTIONAL)

Manche Telefone und öffentlichen Einrichtungen nutzen eine Induktionsschleife bzw. eine induktive Höranlage, um das gewünschte Audiosignal (Musik und Sprache) zu übertragen. Mit Ihren Hörsystemen können Sie dieses Signal direkt empfangen – ohne störende Geräusche aus der Umgebung.

Gewöhnlich wird auf induktive Höranlagen durch Schilder oder Symbole hingewiesen.



Um eine induktive Höranlage nutzen zu können, benötigen Sie ein spezielles Batteriefach. Das Batteriefach ist nur für bestimmte Hörsysteme als Zubehör erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.

Wenn Sie an einem Ort mit induktiver Höranlage sind:

- Wechseln Sie in das Telefonspulenprogramm.

Wenn für Ihre Hörsysteme ein Telefonspulenprogramm eingerichtet wurde, ist dies im Kapitel "Hörprogramme" angegeben.

## TELEFONSPULENPROGRAMM UND FERNBEDIENUNG



### HINWEIS

Für Geräte mit drahtloser Verbindung:  
Die Fernbedienung kann ein pulsierendes Geräusch verursachen, wenn das Telefonspulenprogramm aktiv ist.

- Verwenden Sie die Fernbedienung mit einem Abstand von mindestens 10 cm.

## WARTUNG UND PFLEGE

Um Schäden zu vermeiden ist es wichtig, dass Sie Ihre Hörsysteme pfleglich behandeln und einige Grundregeln beachten, die sicher bald zur täglichen Gewohnheit werden.

## HÖRSYSTEME

### TROCKNEN UND AUFBEWAHREN

- Trocknen Sie Ihre Hörsysteme über Nacht.
- Wenn Sie die Hörsysteme längere Zeit nicht tragen, lagern Sie diese mit geöffnetem Batteriefach und ohne eingelegte Batterien in einer trockenen Umgebung.
- Fragen Sie Ihren Hörakustiker nach weiteren Informationen.

### REINIGEN

Ihre Hörsysteme haben eine Schutzbeschichtung. Sie müssen Ihre Hörsysteme trotzdem regelmäßig reinigen, um eine Beschädigung der Hörsysteme oder gesundheitliche Risiken zu vermeiden.

- Reinigen Sie Ihre Hörsysteme mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie nie fließendes Wasser und tauchen Sie Ihre Hörsysteme nicht in Wasser.
- Üben Sie beim Reinigen niemals Druck aus.



Fragen Sie Ihren Hörakustiker nach Reinigungsmitteln, Pflegezubehör und weiteren Informationen, um Ihre Hörsysteme in gutem Zustand zu halten.

## OHRSTÜCKE, TRAGEHAKEN UND SCHLÄUCHE


Auf den Ohrstücken kann sich Cerumen (Ohrenschmalz) ansammeln. Dadurch kann die Klangqualität beeinträchtigt werden.

- Für Hörsysteme mit Standard-Schlauch (Thin Tube):  
Reinigen Sie die Ohrstücke täglich. Reinigen Sie die Schläuche bei Bedarf.  
Wechseln Sie die Ohrstücke und Schläuche etwa alle drei bis sechs Monate aus. Ersetzen Sie sie bereits früher, sobald Sie Risse oder andere Veränderungen feststellen.
- Für Hörsysteme mit Tragehaken:  
Reinigen Sie die Ohrstücke täglich.  
Wechseln Sie die Tragehaken, sobald Sie Risse oder andere Veränderungen feststellen.  
Bitten Sie Ihren Hörakustiker, bei Bedarf die Schläuche zu reinigen oder die Ohrstücke und Schläuche auszuwechseln.

## OHRSTÜCKE REINIGEN

- Reinigen Sie die Ohrstücke gleich nach dem Herausnehmen mit einem weichen, trockenen Tuch.

Das verhindert, dass das Cerumen trocken und hart wird.

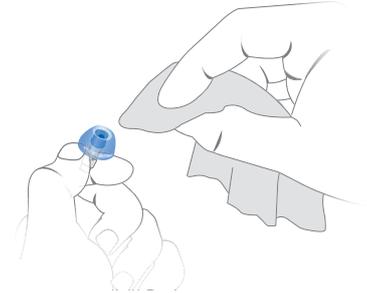

- Verwenden Sie nie fließendes Wasser und tauchen Sie die Ohrstücke nicht in Wasser.


## STANDARD-SCHLÄUCHE REINIGEN

Verwenden Sie nie fließendes Wasser und tauchen Sie die Schläuche nicht in Wasser.

Standard-Schläuche (Thin Tube) können Sie mit einem speziellen Reinigungsdraht reinigen. Fragen Sie Ihren Hörakustiker nach geeigneten Reinigungsdrähten.

- Entfernen Sie Schlauch und Adapter, indem Sie den Adapter vom Hörsystem abschrauben.
- Führen Sie den Reinigungsdraht vorsichtig in den Adapter ein ①.

- Schieben Sie den Reinigungsdraht durch den ganzen Schlauch hindurch ②.

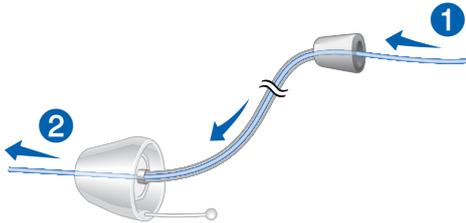

- Wischen Sie Cerumen und andere Verschmutzungen, die entfernt wurden, ab.
- Ziehen Sie den Reinigungsdraht vollständig heraus.
- Verbinden Sie Schlauch und Adapter wieder mit dem Hörsystem.

#### STANDARD-OHRSTÜCKE (OPEN TIP) AUSWECHSELN

- Ziehen Sie das benutzte Ohrstück ab und stecken Sie das neue Ohrstück auf.



#### STANDARD-SCHLÄUCHE UND ADAPTER AUSWECHSELN

- Schrauben Sie den benutzten Schlauch vom Adapter ab ①.
- Schrauben Sie, falls notwendig, den benutzten Adapter ab ②.



- Schrauben Sie den neuen Adapter und Schlauch an.

## TRAGEHAKEN AUSWECHSELN

- Schrauben Sie den benutzten Tragehaken ab.
- Positionieren Sie den Tragehaken so auf dem Gewinde, wie in Bild ① dargestellt.
- Schrauben Sie den Tragehaken vorsichtig mit drei vollen Umdrehungen an ②.

Drehen Sie ihn nicht weiter, um eine Beschädigung zu verhindern.



## PROFESSIONELLE WARTUNG

Ihr Hörakustiker kann Ihre Hörsysteme gründlich und professionell reinigen und warten.

Maßgefertigte Ohrstücke und Wachsfilter sollten bei Bedarf von einer Fachkraft ausgetauscht werden.

Fragen Sie Ihren Hörakustiker, welche Wartungsabstände für Sie empfehlenswert sind.

## WEITERE INFORMATIONEN

### SICHERHEITSHINWEISE

Weitere Sicherheitshinweise finden Sie im Sicherheitshandbuch, das im Lieferumfang enthalten ist.

### ZUBEHÖR

Sie können die Smart Direct App verwenden und Ihre Hörsysteme bequem fernbedienen. Mit der App können Sie auch Signaltöne deaktivieren, Klangprofile abrufen und vieles mehr.

Sie können auch eine Fernbedienung verwenden. Die Hörsysteme unterstützen CROS- und BiCROS-Lösungen für einseitig Gehörlose.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.

### SYMBOLE IN DIESEM DOKUMENT



Deutet auf eine Situation hin, die zu ernsthaften, mäßigen oder geringfügigen Verletzungen führen kann.



Deutet auf mögliche Sachschäden hin.



Anleitungen und Tipps, wie Sie Ihre Hörsysteme besser und effektiver nutzen.



"Made for iPhone", "Made for iPad" und "Made for iPod" bedeutet, dass das Gerät speziell für die

Verwendung mit iPhone, iPad oder iPod entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPhone, iPad oder iPod die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

### PROBLEMBEHANDLUNG

#### Problem und Lösungsmöglichkeiten

Der Ton ist schwach.

- Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Wechseln Sie die Batterie aus.
- Reinigen Sie das Ohrstück und den Schlauch oder wechseln Sie beides aus.

Aus dem Hörsystem ertönen Pfeiftöne.

- Setzen Sie das Ohrstück erneut ein, bis es fest sitzt.
- Verringern Sie die Lautstärke.
- Reinigen Sie das Ohrstück oder wechseln Sie es aus.

Der Ton ist verzerrt.

- Verringern Sie die Lautstärke.
- Wechseln Sie die Batterie aus.
- Reinigen Sie das Ohrstück und den Schlauch oder wechseln Sie beides aus.

### Problem und Lösungsmöglichkeiten

Aus dem Hörsystem ertönen Signaltöne.

- Wechseln Sie die Batterie aus.

Das Hörsystem funktioniert nicht.

- Schalten Sie das Hörsystem ein.
- Schließen Sie das Batteriefach vorsichtig und vollständig.
- Wechseln Sie die Batterie aus.
- Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt wurde.
- Die Einschaltverzögerung ist aktiviert. Warten Sie einige Sekunden und prüfen Sie erneut.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.

## SERVICE UND GARANTIE

### Seriennummern

Links:

Rechts:

### Service-Termine

1:	4:
2:	5:
3:	6:

### Garantie

Kaufdatum:

Garantiedauer in Monaten:

Ihr Hörakustiker



AS AUDIO-SERVICE GmbH

Alter Postweg 190 · 32584 Löhne · Germany

[www.audioservice.com](http://www.audioservice.com)



Art.-Nr. 109 60 959 / V1 · 09.2018 · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.