

Gebrauchsanweisung
ITC/ITE Li 7

Made for
 iPhone | iPad | iPod

Atelier

Mehr als ein Hörsystem.

AS

Inhaltsverzeichnis

Willkommen	4
Ihre Hörsysteme	5
Art der Hörsysteme	5
Lernen Sie Ihre Hörsysteme kennen	6
Bestandteile und Namen	6
Bedienelemente	6
Hörprogramme	8
Einstellungen	8
Täglicher Einsatz	9
Laden	9
Ein- und ausschalten der Hörsysteme	10
In den Standby-Modus wechseln	11
Hörsysteme einsetzen und herausnehmen	12
Lautstärke einstellen	14
Hörprogramm wechseln	15
Zusätzliche Einstellungen (optional)	15
Besondere Hörsituationen	16
Telefonieren	16
Audioübertragung mit dem iPhone	17
Audioübertragung mit dem Android-Smartphone	17
Flugzeugmodus für Hörsysteme	17

Wartung und Pflege	19
Reinigen	19
Trocknen	20
Lagerung	20
Professionelle Wartung	21
Wichtige Sicherheitsinformation	22
Sicherheitshinweise zu Akkus	22
Weitere Informationen	24
Zubehör	24
Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen	24
Erklärung der Symbole	26
Problembehandlung	28
Landesspezifische Information	30
Service und Gewährleistung	31

Willkommen

Danke, dass Sie sich für unsere Hörsysteme entschieden haben. Wie bei allen neuen Geräten kann es ein wenig dauern, bis Sie mit den Hörsystemen vertraut sind.

Mit Hilfe dieser Anleitung und der Unterstützung Ihres Hörakustikers werden Sie die Vorzüge und die höhere Lebensqualität zu schätzen wissen, die Ihnen Ihre Hörsysteme bieten.

Damit Sie den größten Nutzen aus Ihren Hörsystemen ziehen können, wird empfohlen, dass Sie die Hörsysteme täglich und den ganzen Tag über tragen. Dies hilft Ihnen dabei, sich an Ihre neuen Hörsysteme zu gewöhnen.



Möglicherweise sieht das Gerät nicht genau so aus, wie auf den erläuternden Abbildungen in dieser Anleitung. Wir behalten uns das Recht vor, alle Änderungen vorzunehmen, die wir für notwendig halten.



VORSICHT

Es ist wichtig, dass Sie diese Bedienungsanleitung und das Sicherheitshandbuch sorgfältig und vollständig lesen. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um Sachschäden oder Verletzungen zu vermeiden.



Laden Sie Ihre Hörsysteme vollständig auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.

Ihre Hörsysteme



Diese Bedienungsanleitung beschreibt optionale Funktionen, die Ihre Hörsysteme möglicherweise nicht alle haben.

Bitte Sie Ihren Hörakustiker, die Funktionen Ihrer Hörsysteme zu markieren.

Art der Hörsysteme

Ihre Hörsysteme werden in der Ohrmuschel getragen. Die Hörsysteme sind nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt und nicht für Personen, deren Entwicklungsalter unter 3 Jahren liegt.

Ein Power-Akku (Lithium-Ionen-Akku) ist fest in Ihr Hörsystem eingebaut. Dies ermöglicht einfaches Laden mit Ihrem Ladegerät.

Die drahtlose Funktionalität ermöglicht fortschrittliche audiologische Funktionen und die Synchronisierung Ihrer beiden Hörsysteme.

Ihre Hörsysteme verfügen über Bluetooth® Low Energy* Technologie ausgestattet. Diese ermöglicht einfache Datenübertragung mit Ihrem Smartphone sowie nahtlose Audioübertragung mit Ihrem iPhone**.

* Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch WS Audiology Denmark A/S unterliegt einer Lizenzvereinbarung. Andere ausgewiesene Markennamen und Handelsmarken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.


** iPad, iPhone und iPod sind Markenzeichen von Apple Inc., registriert in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Lernen Sie Ihre Hörsysteme kennen

Bitte laden Sie die Audio Service App für Fernbedienungsfunktionen herunter.

Bei Ihrem Hörakustiker können Sie sich über weitere Fernbedienungsoptionen informieren.

Bestandteile und Namen

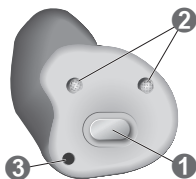

① Drucktaster

③ Belüftungsbohrung

② Mikrofonöffnung

Bedienelemente

Mit dem Drucktaster können Sie beispielsweise das Hörprogramm einstellen. Ihr Hörakustiker hat den Drucktaster mit Ihren gewünschten Funktionen programmiert.



Sie können die Audio Service App zur Fernsteuerung verwenden.

Drucktaster Funktion	L	R
Kurz drücken:		
Nächstes Hörprogramm	☐	☐
Lauter	☐	☐
Leiser	☐	☐
Tinnitus-Therapie-Signal lauter	☐	☐
Tinnitus-Therapie-Signal leiser	☐	☐
TV-Stream an/aus	☐	☐
Etwa 2 Sekunden lang drücken:		
Nächstes Hörprogramm	☐	☐
Lauter	☐	☐
Leiser	☐	☐
Tinnitus-Therapie-Signal lauter	☐	☐
Tinnitus-Therapie-Signal leiser	☐	☐
TV-Stream an/aus	☐	☐
Länger als 3 Sekunden drücken:		
Standby / einschalten	☐	☐
L = Links, R = Rechts		

Hörprogramme

1

2

3

4

5

6

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Hörprogramm wechseln“.

Einstellungen

- ☐ Die **Tinnitus-Therapie-Funktion** erzeugt ein Geräusch, um Sie von Ihrem Tinnitus abzulenken.


Täglicher Einsatz

Laden

Nutzen Sie Custom Charger Station zum Laden Ihrer Hörsysteme.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Ladegeräts. Sie finden in der Bedienungsanleitung auch nützliche Tipps zum Laden.

Platzieren Sie Ihre Hörsysteme wie dargestellt im Ladegerät.

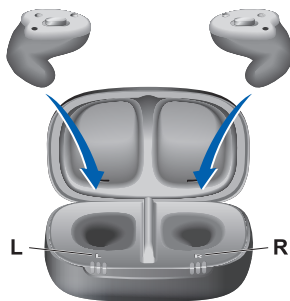

Platzieren Sie die Hörsysteme nicht im Ladegerät, wenn dieses warm ist.

Ein- und ausschalten der Hörsysteme

Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Hörsysteme ein- oder auszuschalten.

► Einschalten:

Nehmen Sie die Hörsysteme aus dem Ladegerät.

Die Startmelodie ertönt in Ihren Hörsystemen.

Standard-Lautstärke und -Hörprogramm sind eingestellt.

► Ausschalten im Ladegerät:

Platzieren Sie die Hörsysteme im Ladegerät.




Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät eingeschaltet ist.

- Wenn das Ladegerät ausgeschaltet ist und Sie eingeschaltete Hörsysteme darin platzieren, werden diese nicht automatisch ausgeschaltet und nicht aufgeladen.
- Wenn das Ladegerät eingeschaltet ist und Sie eingeschaltete Hörsysteme darin platzieren, werden diese automatisch ausgeschaltet und aufgeladen.

► Ausschalten über Drucktaster:

Verwenden Sie den Drucktaster am Hörsystem.

Halten Sie ihn einfach 10 Sekunden lang gedrückt.

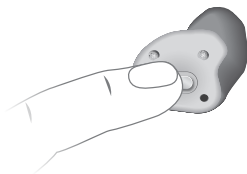

In den Standby-Modus wechseln

Mit einer Fernbedienung können Sie Ihre Hörsysteme in den Standby-Modus schalten. Dieser Modus schaltet die Hörsysteme stumm. Wenn Sie den Standby-Modus verlassen, bleiben Lautstärke und Hörprogramm so, wie Sie sie **zuletzt eingestellt** hatten.

i

- ▶ Im Standby-Modus sind die Hörsysteme **nicht** vollständig ausgeschaltet. Sie verbrauchen etwas Strom.

Deshalb empfehlen wir, nur für kurze Zeit in den Standby-Modus zu wechseln.

- ▶ Wenn Sie den Standby-Modus verlassen wollen, aber die Fernbedienung nicht zur Hand haben:

Schalten Sie Ihre Hörsysteme aus und wieder ein, indem Sie diese kurz im Ladegerät platzieren, bis eine oder mehrere LEDs aufleuchten.

Hierfür muss das Ladegerät mit Strom versorgt sein. Warten Sie, bis das Hörsystem die Startmelodie abspielt. Dies kann einige Sekunden dauern. Beachten Sie, dass jetzt **Standard**-Lautstärke und -Hörprogramm eingestellt sind.

Hörsysteme einsetzen und herausnehmen


Ihre Hörsysteme wurden speziell für Ihr linkes und Ihr rechtes Ohr angepasst. An der Beschriftung erkennen Sie, für welches Ohr das Hörsystem angepasst ist:

- "R" = rechtes Ohr
- "L" = linkes Ohr

Hörsystem einsetzen:

- ▶ Schieben Sie das Hörsystem vorsichtig in den Gehörgang.
- ▶ Drehen Sie es leicht, bis es gut sitzt.


Öffnen und schließen Sie Ihren Mund, um Lufteinschlüsse im Gehörgang zu vermeiden.

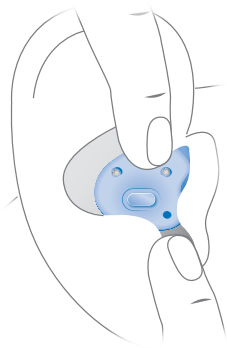

Hörsystem ablegen:

- ▶ Drücken Sie leicht an die Rückseite Ihres Ohres, um das Hörsystem im Gehörgang zu lösen.

- Greifen Sie das Hörsystem im Gehörgang mit zwei Fingern und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

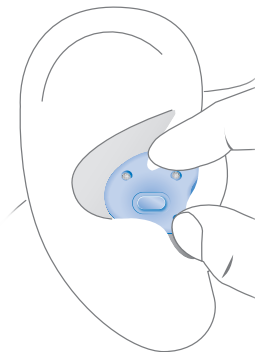

Reinigen und trocknen Sie Ihre Hörsysteme nach dem Tragen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Wartung und Pflege“.

Lautstärke einstellen

Ihre Hörsysteme passen die Lautstärke automatisch an die Hörsituation an.

- Wenn Sie die Lautstärke lieber manuell einstellen, verwenden Sie eine Fernbedienung.

Auf Wunsch kann ein Signal bei Veränderung der Lautstärke ertönen.

Hörprogramm wechseln

Ihre Hörsysteme passen den Klangcharakter automatisch an die jeweilige Hörsituation an.

Ihre Hörsysteme können auch mehrere Hörprogramme haben. Mit Hilfe der Hörprogramme verändern Sie den Klangcharakter bei Bedarf selbst. Auf Wunsch kann ein Signal beim Wechsel des Hörprogramms ertönen.

- Um das Hörprogramm zu wechseln, verwenden Sie eine Fernbedienung.

Im Kapitel "Hörprogramme" finden Sie eine Liste Ihrer Hörprogramme.

Die Standard-Lautstärke wird verwendet.

Zusätzliche Einstellungen (optional)


Mit den Bedienelementen Ihrer Hörsysteme können Sie auch andere Einstellungen vornehmen, beispielsweise die Lautstärke des Tinnitus-Therapie-Signals einstellen.

Schlagen Sie im Kapitel "Bedienelemente" Ihre Einstellungen der Bedienelemente nach.

Besondere Hörsituationen

Telefonieren

Beim Telefonieren müssen Sie den Telefonhörer etwas drehen, sodass das Ohr nicht vollständig vom Telefonhörer verdeckt wird.

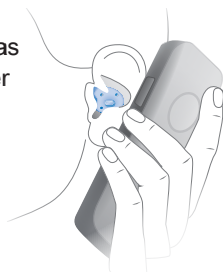

Telefonprogramm

Wenn Sie beim Telefonieren eine bestimmte Lautstärkeeinstellung bevorzugen, bitten Sie Ihren Hörakustiker, ein spezielles Telefonprogramm einzurichten.

- Wechseln Sie in das Telefonprogramm, wenn Sie telefonieren.

Wenn für Ihre Hörsysteme ein Telefonprogramm eingerichtet wurde, ist dies im Kapitel "Hörprogramme" angegeben.

Audioübertragung mit dem iPhone

Ihre Hörsysteme sind **Made for iPhone** Hörsysteme. Das bedeutet, dass Sie Telefonanrufe oder Musik von Ihrem iPhone direkt in Ihre Hörsysteme übertragen können.

Für Informationen über die kompatiblen iOS-Geräte, zum Pairing, zur Audioübertragung und zu weiteren nützlichen Funktionen fragen Sie Ihren Hörakustiker.

Audioübertragung mit dem Android-Smartphone

Wenn Ihr Mobiltelefon Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) unterstützt, können Sie Telefonanrufe oder Musik von Ihrem iPhone direkt in Ihre Hörsysteme übertragen.

Weiterführende Informationen über die kompatiblen Android-Geräte, zum Pairing, zur Audioübertragung und zu weiteren nützlichen Funktionen erhalten Sie von Ihrem Hörakustiker.

Flugzeugmodus für Hörsysteme

Wenn sich Ihre Hörsysteme im Flugzeugmodus befinden, ist Bluetooth® in Ihren Hörsystemen ausgeschaltet. In Bereichen, in denen die Verwendung der Bluetooth-Technologie nicht erlaubt ist (z. B. in manchen Flugzeugen), können Sie den Bluetooth-Modus deaktivieren. Dadurch wird Bluetooth in Ihren Hörsystemen vorübergehend ausgeschaltet. Die Hörsysteme funktionieren ohne Bluetooth, aber direkte Audioübertragung ist nicht möglich und weitere Funktionen sind nicht verfügbar.

- Verwenden Sie die Smartphone App, um den Bluetooth-Modus zu deaktivieren oder zu aktivieren.

Ein Signal ertönt, wenn der Bluetooth-Modus deaktiviert oder aktiviert wird.

Wartung und Pflege

Um Schäden zu vermeiden ist es wichtig, dass Sie Ihre Hörsysteme pfleglich behandeln und einige Grundregeln beachten, die sicher bald zur täglichen Gewohnheit werden.

Reinigen

Aus hygienischen Gründen und um die Leistungsfähigkeit Ihrer Hörsysteme zu erhalten, reinigen Sie Ihre Hörsysteme täglich.

- ▶ Reinigen Sie Ihre Hörsysteme täglich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- ▶ Ihre Hörsysteme können einen Cerumenschutz haben. Der Cerumenschutz verhindert, dass Cerumen in die Hörsysteme eindringt. Achten Sie darauf, den Cerumenschutz nicht zu beschädigen, wenn Sie die Hörsysteme reinigen.
- ▶ Verwenden Sie nie fließendes Wasser und tauchen Sie die Geräte nicht in Wasser.
- ▶ Üben Sie beim Reinigen niemals Druck aus.



- Fragen Sie Ihren Hörakustiker nach Empfehlungen für Reinigungsmittel und Pflegezubehör sowie weiteren Informationen, um Ihre Hörsysteme in gutem Zustand zu halten.

Trocknen

- Trocknen Sie Ihre Hörsysteme über Nacht.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.

Lagerung

Kurzzeitige Aufbewahrung (bis zu einigen Tagen):

- Schalten Sie Ihre Hörsysteme aus, indem Sie diese im Ladegerät platzieren.

Das Ladegerät muss eingeschaltet sein. Wenn das Ladegerät nicht eingeschaltet ist und Sie die Hörsysteme im Ladegerät platzieren, werden die Hörsysteme **nicht** ausgeschaltet.

- Beachten Sie: Wenn Sie die Hörsysteme mit einer Fernbedienung oder einer Smartphone App ausschalten, sind sie **nicht** ganz ausgeschaltet. Sie befinden sich im Standby-Modus und verbrauchen immer noch Strom.

Längere Aufbewahrung (Wochen, Monate, ...):

- Laden Sie Ihre Hörsysteme vollständig auf. Trennen Sie dann das Ladegerät von der Stromquelle, schalten Sie die Hörsysteme manuell aus, platzieren Sie diese in dem Ladegerät und schließen Sie den Deckel.

- ▶ Wir empfehlen, Trocknungsprodukte zu verwenden, wenn Sie die Hörsysteme ungenutzt aufbewahren.
- ▶ Lagern Sie Ihre Hörsysteme bei längerer Nichtbenutzung in einer trockenen Umgebung.
- ▶ Beachten Sie die Lagerbedingungen im Abschnitt „Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen“.

Professionelle Wartung

Ihr Hörakustiker kann Ihre Hörsysteme gründlich und professionell reinigen und warten.

Der Cerumenschutz oder die Mikrofonabdeckung sollten bei Bedarf von einer Fachkraft gewechselt werden.

Fragen Sie Ihren Hörakustiker, welche Wartungsabstände für Sie empfehlenswert sind.

Wichtige Sicherheitsinformation

Sicherheitshinweise zu Akkus

Dieser Abschnitt enthält wichtige Sicherheitshinweise zum Akku. Weitere Sicherheitshinweise finden Sie im Sicherheitshandbuch, das mit den Hörsystemen mitgeliefert wird.



WARNUNG

Ein Power-Akku (Lithium-Ionen-Akku) ist fest in Ihr Hörsystem eingebaut. Bei falscher Handhabung des Power-Akkus oder des Hörsystems kann der Power-Akku explodieren.

Gefahr von Verletzungen, Feuer oder Explosion!

- ▶ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise für Power-Akkus in diesem Kapitel.
- ▶ Beachten Sie die Betriebsbedingungen.
- ▶ Achten Sie besonders darauf, die Hörsysteme vor extremer Hitze (z. B. Feuer, Mikrowellenherd, Induktionsherd oder andere starke Magnetfelder) und vor Sonne zu schützen.
- ▶ Laden Sie Ihre Hörsysteme ausschließlich mit dem geprüften Ladegerät. Wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.
- ▶ Zerlegen Sie den Power-Akku nicht.



WARNUNG

Bei falscher Handhabung des Power-Akkus oder des Hörsystems kann der Power-Akku explodieren. Gefahr von Verletzungen, Feuer oder Explosion! Austausch und Reparatur müssen im Service Center durchgeführt werden.

- ▶ Reparieren Sie den Power-Akku nicht selbst und tauschen Sie diesen nicht selbst aus.
- ▶ Verwenden Sie die Hörsysteme nicht, wenn deren Leistung nach dem Laden deutlich nachlässt.
- ▶ In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein Power-Akku platzt oder explodiert, halten Sie alle leicht entflammbaren Materialien fern.



HINWEIS

- ▶ Entsorgen Sie zur Vermeidung von Umweltverschmutzung Akkus, Hörsysteme oder Ladegeräte nicht im Hausmüll.
- ▶ Recyceln oder entsorgen Sie Akkus, Hörsysteme oder das Ladegerät gemäß den geltenden Vorschriften.

Weitere Sicherheitshinweise, die nicht in dieser Bedienungsanleitung erwähnt werden, finden Sie im Sicherheitshandbuch, das im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen

Zubehör

Welches Zubehör erhältlich ist, hängt vom Typ des Hörsystems ab. Beispiele sind eine Fernbedienung, ein Audiostreaming-Gerät oder eine Smartphone App als Fernbedienung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.

Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen

Beachten Sie, dass Sie die Hörsysteme mindestens alle 6 Monate aufladen müssen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wartung und Pflege“.

Betriebsbedingungen	Entladen	Laden
Temperatur	0-50 °C	10-35 °C
	32-122 °F	50-95 °F
Relative Luftfeuchtigkeit	5-93 %	5-93 %
Luftdruck	700-1060 hPa	700-1060 hPa

Während des Transports und der Lagerung sollten folgende Wertebereiche nicht für längere Zeit verlassen werden:

	Lagerung	Transport
Temperatur (empfohlen)	10-25 °C 50-77 °F	-20-60 °C -4-140 °F
Temperatur (Maximalbereich)	10-40 °C 50-104 °F	-20-60 °C -4-140 °F
Relative Luftfeuchtigkeit (empfohlen)	20-80 %	5-90 %
Relative Luftfeuchtigkeit (Maximalbereich)	10-80 %	5-90 %
Luftdruck	700-1060 hPa	700-1060 hPa



WARNUNG

Gefahr von Verletzungen, Feuer oder Explosion beim Versand.

- Versenden Sie den Power-Akku oder die Hörsysteme gemäß den lokalen Vorschriften.

Erklärung der Symbole

In diesem Dokument verwendete Symbole

 Weist auf eine Situation hin, die zu schweren, mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.

 Weist auf mögliche Sachschäden hin.

 Ratschläge und Tipps, wie Sie Ihr Gerät besser und effektiver nutzen können.

 Häufig gestellte Frage.

Symbole auf dem Gerät oder der Verpackung

 CE-Konformitätskennzeichnung: Bestätigt die Übereinstimmung mit bestimmten Europäischen Richtlinien. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Konformitätsinformationen“.

 Australische Konformitätskennzeichnung für EMV und Funkverbindungen. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Konformitätsinformationen“.

 Hersteller des Gerätes.

 Entsorgen Sie das Gerät nicht über den Hausmüll. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Entsorgungshinweise“.

Symbole auf dem Gerät oder der Verpackung



Die Verpackung kann recycelt werden.



Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.



Während des Transports trocken halten.



Temperatur während des Transports.
Lesen Sie hierzu den Abschnitt
„Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen“.



Relative Luftfeuchtigkeit während des
Transports. Lesen Sie hierzu den Abschnitt
„Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen“.



Luftdruck während des Transports.
Lesen Sie hierzu den Abschnitt
„Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen“.



Medizinprodukt.



Bluetooth® Niedrigenergie-Technologie.

Made for

iPhone | iPad | iPod

"Made for iPhone", "Made for iPad" und "Made for iPod" bedeuten, dass das Gerät speziell für die Verwendung mit iPhone, iPad bzw. iPod entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt

keine Verantwortung für den Betrieb dieses Gerätes oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPhone, iPad bzw. iPod die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.



Gerätedaten des Ladegeräts

Unter dem entfernbaren Silikonpolster im Deckel des Ladegeräts befindet sich ein Etikett mit Symbolen, der Seriennummer, der CE-Kennzeichnung und dem rechtmäßigen Hersteller des Ladegeräts. Heben Sie das Polster mit Ihrem Fingernagel vom Deckel ab und ziehen Sie es ab. Um es wieder einzusetzen, drücken Sie entlang den Kanten.

Problembehandlung

Problem und Lösungsmöglichkeiten

Der Ton ist schwach.

- Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Laden Sie das Hörsystem.
- Reinigen Sie das Ohrstück oder wechseln Sie es aus.

Aus dem Hörsystem ertönen Pfeiftöne.

- Setzen Sie das Ohrstück erneut ein, bis es fest sitzt.
 - Verringern Sie die Lautstärke.
 - Reinigen Sie das Ohrstück oder wechseln Sie es aus.
-

Problem und Lösungsmöglichkeiten

Der Ton ist verzerrt.

- Verringern Sie die Lautstärke.
 - Laden Sie das Hörsystem.
 - Reinigen Sie das Ohrstück oder wechseln Sie es aus.
-

Aus dem Hörsystem ertönen Signaltöne.

- Laden Sie das Hörsystem.
-

Hörsystem funktioniert nicht.

- Schalten Sie das Hörsystem ein.
 - Laden Sie das Hörsystem. Beachten Sie auch die Status-LEDs am Ladegerät.
-

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.

Landesspezifische Information

USA und Kanada

Information zur Zertifizierung der Hörsysteme mit drahtloser Funktionalität:

ITC/ITE Li 7

- HVIN: RFM005
- Enthält FCC ID: 2AXDT-RFM005
- Enthält IC ID: 26428-RFM005

Service und Gewährleistung

Seriennummern

Linkes Hörsystem:

Rechtes Hörsystem:

Ladegerät:

Service-Termine

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Gewährleistung

Kaufdatum:

Gewährleistungsdauer in Monaten:

Ihr Hörakustiker



WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngø
Dänemark

Audio Service ist eine Marke von WSAUD A/S

Document No. 05206-99T02-0000 DE
Order/Item No. 210 233 30
Master Rev01, 08.2022
© 10.2022, WSAUD A/S. All rights reserved

