




Intuis M 4, Intuis P 4

Bedienungsanleitung

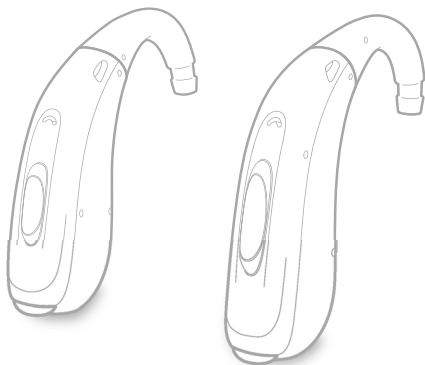

Made for

 iPhone | iPad

Inhaltsverzeichnis

Herzlich willkommen	4
<hr/>	
Ihre Hörsysteme	5
<hr/>	
Hörsystemtyp	5
Lernen Sie Ihre Hörsysteme kennen	6
Bestandteile und Namen	7
Bedienelemente	9
Hörprogramme	10
Einstellungen	10
Batterien	11
<hr/>	
Batteriegröße und Tipps zur Handhabung	11
Batterien austauschen	12
Manipulationssichere Funktion (optional)	13
Täglicher Einsatz	15
<hr/>	
Ein- und ausschalten	15
Standby-Modus	16
Einsetzen und Entnehmen des Hörsystems	17
Lautstärke einstellen	21
Hörprogramm wechseln	22
Zusätzliche Einstellungen (optional)	22

Besondere Hörsituationen	23
Telefonieren	23
Audiostreaming	23
Audioübertragung mit dem iPhone	24
Audioübertragung mit dem Android-Smartphone	24
Bluetooth	25
Induktive Höranlagen (optional)	26
Wartung und Pflege	27
Hörsysteme	27
Ohrstücke und Schläuche	28
Professionelle Wartung	31
Weitere Informationen	32
Sicherheitshinweise	32
Zubehör	32
Erklärung der Symbole	33
Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen	34
Problembehandlung	34
Landesspezifische Information	36
Service und Gewährleistung	39

Herzlich willkommen

Danke, dass Sie sich für unsere Hörsysteme als Ihren Begleiter im Alltag entschieden haben. Wie bei allen neuen Geräten kann es ein wenig dauern, bis Sie mit den Hörsystemen vertraut sind.

Mit Hilfe dieser Anleitung und der Unterstützung Ihres Hörakustikers werden Sie die Vorzüge und die höhere Lebensqualität zu schätzen wissen, die Ihnen Ihre Hörsysteme bieten.

Damit Sie den größten Nutzen aus Ihren Hörsystemen ziehen können, wird empfohlen, dass Sie die Hörsysteme täglich und den ganzen Tag über tragen. Dies hilft Ihnen dabei, sich an Ihre neuen Hörsysteme zu gewöhnen.



VORSICHT

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsanweisung und das Sicherheitshandbuch sorgfältig und vollständig lesen. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um Sachschäden oder Verletzungen zu vermeiden.



Möglicherweise sieht das Gerät nicht genau so aus, wie auf den erläuternden Abbildungen in dieser Anleitung. Wir behalten uns das Recht vor, alle Änderungen vorzunehmen, die wir für notwendig halten.

Ihre Hörsysteme



Diese Gebrauchsanweisung beschreibt optionale Funktionen, die Ihre Hörsysteme möglicherweise nicht haben.

Bitte Sie Ihren Hörakustiker, jene Funktionen zu markieren, die für Ihr Hörsystem zur Verfügung stehen.

Hörsystemtyp

Ihre Hörsysteme sind HdO-Modelle (hinter dem Ohr). Ein Schlauch leitet den Ton vom Hörsystem ins Ohr. Die Hörsysteme sind nicht für Kinder unter 3 Jahren oder für Personen bestimmt, deren Entwicklungsalter unter 3 Jahren liegt.

Die drahtlose Funktionalität ermöglicht erweiterte audiologische Funktionen und Synchronisierung Ihrer beiden Hörsysteme.

Ihre Hörsysteme verfügen über Bluetooth® Low Energy* Technologie. Diese ermöglicht einen einfachen Datenaustausch mit Ihrem Smartphone sowie nahtlose Audioübertragung auf Ihr iPhone** sowie auf manche Android-Smartphones, die Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA, Audioübertragung für Hörsysteme) unterstützen.

* Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch WS Audiology Denmark A/S in Verbindung mit dem Produkt unterliegt einer Lizenzvereinbarung. Andere ausgewiesene Markennamen und Handelsmarken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

** iPad®, iPad Air®, iPad Pro® und iPhone® sind Handelsmarken von Apple Inc., registriert in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Beachten Sie, dass Bluetooth nicht in allen Leistungsstufen verfügbar ist.

Lernen Sie Ihre Hörsysteme kennen

Machen Sie sich zuerst mit Ihren neuen Hörsystemen vertraut. Nehmen Sie die Hörsysteme in die Hand, drücken Sie die Bedienelemente und merken Sie sich deren Lage auf dem Hörsystem. Wenn Sie die Hörsysteme später tragen, fällt es Ihnen leichter, die Bedienelemente zu ertasten und zu drücken.



Wenn es Ihnen Schwierigkeiten bereitet, die Bedienelemente während des Tragens der Hörsysteme zu drücken, können Sie Ihren Hörakustiker fragen, ob eine Fernbedienung oder eine Smartphone App zur Steuerung Ihrer Hörsysteme verfügbar ist.

Bestandteile und Namen

Ihre Hörsysteme sind entweder mit einem Tragehaken und einem individuell gefertigten Ohrpassstück verbunden oder mit einem Standardschlauch und einem Standard-Ohrstück.



1 Ohrstück

2 Schlauch

3 Mikrofonöffnungen

4 Wipptaster

5 Tragehaken




6 Batteriefach
(Ein-/Ausschalter)

7 Seitenanzeige
(rot = rechts, blau = links)

Sie können Standard-Ohrstücke zusammen mit einem Standard-Schlauch verwenden, oder individuell gefertigte Ohrstücke mit einem Tragehaken und einem Schlauch.


Standard-Ohrstücke können Sie leicht auswechseln und Standard-Schläuche sind einfach zu reinigen. Lesen Sie mehr im Kapitel „Wartung und Pflege“.

Sie können die folgenden Standard-Ohrstücke verwenden:

Standard-Ohrstücke	Größe
<input type="radio"/> 	Sleeve 3.0 Vented/Closed/Power
<input type="radio"/> 	Eartip 3.0 Open
<input type="radio"/> 	Eartip 3.0 Tulip

Die Standard-Ohrstücke können Sie leicht auswechseln. Lesen Sie mehr im Kapitel „Wartung und Pflege“.

Maßgefertigte Ohrstücke

- | | |
|--|----------------------------|
| <input type="radio"/>  | Ohrpassstück (Earmold) 3.0 |
|--|----------------------------|

Bedienelemente

Mit dem Wipptaster können Sie beispielsweise das Hörprogramm einstellen. Ihr Hörakustiker hat den Wipptaster mit Ihren gewünschten Funktionen programmiert.

Wipptaster-Funktion	L	R
<hr/> Kurz drücken:		
Nächstes / vorheriges Hörprogramm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lauter / leiser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus-Therapie-Signal lauter/leiser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV-Stream an/aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/> Etwa 2 Sekunden lang drücken:		
Nächstes / vorheriges Hörprogramm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lauter / leiser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tinnitus-Therapie-Signal lauter/leiser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV-Stream an/aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = Links, R = Rechts



Sie können auch eine Fernbedienung verwenden, um Hörprogramme zu wechseln oder die Lautstärke Ihrer Hörsysteme einzustellen. Mit unserer Smartphone App haben Sie noch mehr Bedienmöglichkeiten.

Hörprogramme

1

2

3

4

5

6

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Hörprogramm wechseln“.

Einstellungen

- Die **Tinnitus-Therapie-Funktion** erzeugt ein Geräusch, um Sie von Ihrem Tinnitus abzulenken.

- Mit der eingebauten **Telefonspule** kann sich Ihr Hörsystem mit induktiven Höranlagen verbinden. Lesen Sie mehr im Kapitel „Induktive Höranlagen“.

Batterien

Wenn die Batterie schwach ist, wird das Hörsystem leiser oder ein Warnsignal ertönt. Es hängt vom Batterietyp ab, wie viel Zeit Sie haben, um die Batterie zu wechseln.

Batteriegröße und Tipps zur Handhabung

Fragen Sie Ihren Hörakustiker nach geeigneten Batterien.


Batteriegröße:	13
----------------	----

- Verwenden Sie immer die richtige Batteriegröße für Ihre Hörsysteme.
- Wenn Sie vorhaben, die Hörsysteme mehrere Tage nicht zu nutzen, entnehmen Sie die Batterien.
- Tragen Sie immer Ersatzbatterien bei sich.
- Entnehmen Sie leere Batterien unverzüglich und befolgen Sie die lokalen Vorschriften zur Batterieentsorgung.


Batterien auswechseln

Batterie entnehmen:

- ▶ Öffnen Sie das Batteriefach.

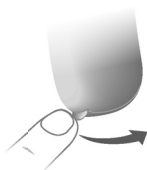

- ▶ Verwenden Sie den Magnetstift, um die Batterie zu entnehmen. Der Magnetstift ist als Zubehör erhältlich.

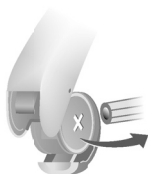

Batterie einsetzen:

- ▶ Wenn die Batterie eine Schutzfolie hat, entfernen Sie die Schutzfolie kurz, bevor Sie die Batterie einsetzen wollen.



- ▶ Legen Sie die Batterie mit dem „+“ Symbol nach oben in das Batteriefach ein (siehe Abbildung).



Beachten Sie: Bitte legen Sie die Batterie nicht direkt in das Gehäuse ein.

- ▶ Schließen Sie das Batteriefach sorgfältig, da es beschädigt werden kann.



Drücken Sie nur in einem geraden Winkel und in dem in der Abbildung hervorgehobenen Bereich. Wenden Sie keine Gewalt an.

Wenn Sie dabei einen Widerstand spüren, ist die Batterie nicht richtig eingelegt.

Manipulationssichere Funktion (optional)

Bitte Sie Ihren Hörakustiker, die manipulationssichere Funktion zu aktivieren.

AUS-Position bei Nichtgebrauch

- ▶ Das Batteriefach lässt sich leicht um einige Millimeter öffnen, um das Hörsystem auszuschalten.


Um sicherzustellen, dass das Hörsystem in der Nähe von Kleinkindern sicher aufbewahrt wird, muss das Batteriefach in die AUS-Position geöffnet werden, wenn das Hörsystem nicht benutzt wird.



Öffnen Sie das Batteriefach nur vollständig, wenn Sie die Batterie wechseln.

So öffnen Sie das Batteriefach:

- ▶ Legen Sie ein kleines Tuch oder Papiertuch über den Griff des Batteriefachs.
- ▶ Öffnen Sie die Klappe mit dem Daumen wie in der Abbildung gezeigt.

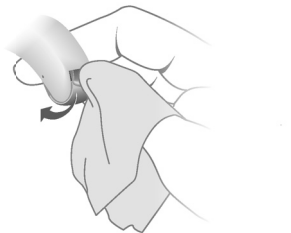

i

Die zum Öffnen der Klappe erforderliche Kraft ist höher als jene für die nicht manipulationssichere Einstellung.

Täglicher Einsatz

Um eine bequeme und einfache Verwendung Ihrer Hörsysteme sicherzustellen, verfügen diese über ein integriertes Bedienelement.

Zusätzlich bieten wir eine App für Android und iOS an, mit der die Handhabung Ihrer Hörsysteme noch einfacher gestaltet wird. Kontaktieren Sie Ihren Hörakustiker, um die Smartphone App herunterzuladen und zu installieren.

Ein- und ausschalten

Sie können Ihre Hörsysteme über das Batteriefach ein- und ausschalten:

- ▶ Einschalten: Schließen Sie das Batteriefach.
Standard-Lautstärke und -Hörprogramm sind eingestellt.
- ▶ Ausschalten: Öffnen Sie das Batteriefach bis zum ersten Widerstand.



Wenn die **Einschaltverzögerung** aktiviert ist, schalten sich die Hörsysteme erst nach einigen Sekunden ein. In dieser Zeit können Sie die Hörsysteme ohne unangenehmes Pfeifgeräusch in Ihre Ohren einsetzen.

Die Einschaltverzögerung kann von Ihrem Hörakustiker aktiviert werden.

Standby-Modus

Der Standby-Modus schaltet die Hörsysteme stumm. Sie sind nicht vollständig abgeschaltet, sondern verbrauchen noch etwas Strom. Deshalb empfehlen wir, nur für kurze Zeit in den Standby-Modus zu wechseln.

So wechseln Sie in den Standby-Modus:

- mit der Fernbedienung
- mit dem Wipptaster.

Halten Sie den Wipptaster einige Sekunden lang gedrückt.

Den Standby-Modus verlassen:

- Die Lautstärke und das Hörprogramm bleiben so, wie sie zuletzt eingestellt waren.
- Wenn Sie den Standby-Modus verlassen möchten, aber die Fernbedienung nicht zur Hand ist, schalten Sie Ihr Gerät aus und wieder ein (durch Öffnen und Schließen des Batteriefachs). In diesem Fall sind Standard-Lautstärke und -Hörprogramm eingestellt.

Einsetzen und Entnehmen des Hörsystems

Ihre Hörsysteme wurden speziell für Ihr linkes und Ihr rechtes Ohr angepasst. An farbigen Markierungen erkennen Sie, für welches Ohr das jeweilige Gerät vorgesehen ist:

- rote Markierung = rechtes Ohr
- blaue Markierung = linkes Ohr




Hörsystem einsetzen:

- ▶ Halten Sie den Schlauch dicht am Ohrstück.
- ▶ Schieben Sie das Ohrstück vorsichtig in den Gehörgang ①.
- ▶ Drehen Sie es leicht, bis es gut sitzt.

Öffnen und schließen Sie Ihren Mund, um Lufteinschlüsse im Gehörgang zu vermeiden.

- ▶ Heben Sie das Hörsystem an und schieben Sie es über Ihre Ohrmuschel ②.

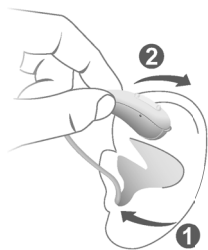

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

- ▶ Setzen Sie das Ohrstück vorsichtig und nicht zu tief in das Ohr ein.

i

- Es kann hilfreich sein, das **rechte** Hörsystem mit der **rechten** Hand und das **linke** Hörsystem mit der **linken** Hand einzusetzen.
- Wenn Ihnen das Einsetzen des Ohrstücks schwerfällt, ziehen Sie Ihr Ohrläppchen mit der anderen Hand nach unten. Dadurch wird der Gehörgang geöffnet und das Ohrstück lässt sich leichter einsetzen.

Die optionale Concha-Abstützung hilft, den Sitz des Ohrstücks im Ohr zu verbessern. Anbringen der optionalen Concha-Abstützung:


Concha Lock Sleeve 3.0

- ▶ Richten Sie den Concha Lock Sleeve 3.0 am Receiver aus, wie dies im Bild gezeigt wird. Schieben Sie dann den Concha Lock Sleeve 3.0 über den Receiver, sodass er sicher sitzt.



Concha Lock 3.0

- ▶ Bringen Sie das Ende der Concha-Abstützung auf eine Höhe mit dem flachen Ende des Receivers.

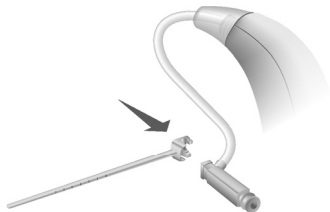

- ▶ Fügen Sie die beiden Enden zusammen und drücken Sie die Concha-Abstützung in Richtung Receiver, bis sie hörbar einrastet.




Um die Concha-Abstützung zu positionieren:

- ▶ Biegen Sie die Concha-Abstützung und legen Sie diese vorsichtig unten in die Ohrmuschel (siehe Bild).



Hörsystem herausnehmen:

- ▶ Heben Sie das Hörsystem an und schieben Sie es über Ihre Ohrmuschel ①.
- ▶ Halten Sie den Schlauch nahe an das Ohrstück und ziehen Sie das Ohrstück vorsichtig heraus ②.

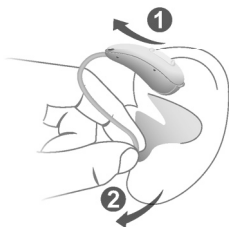

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

- ▶ In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Ohrstück im Ohr verbleibt, wenn Sie das Hörsystem entnehmen. Lassen Sie das Ohrstück in diesem Fall von einer medizinischen Fachkraft entfernen.

Reinigen und trocknen Sie Ihre Hörsysteme nach dem Tragen. Lesen Sie mehr im Kapitel „Wartung und Pflege“.

Lautstärke einstellen

Ihre Hörsysteme passen die Lautstärke automatisch an die Hörsituation an.

- ▶ Wenn Sie die Lautstärke lieber manuell einstellen, drücken Sie den oberen Teil des Wipptasters, um die Lautstärke zu erhöhen oder den unteren Teil des Wipptasters, um die Lautstärke zu verringern.

Schlagen Sie im Kapitel „Bedienelemente“ Ihre Einstellungen des Wipptasters nach.

Auf Wunsch kann ein Signal bei Veränderung der Lautstärke ertönen. Wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht ist, kann auf Wunsch ebenfalls ein Signal ertönen.

Hörprogramm wechseln

Ihre Hörsysteme passen den Klangcharakter automatisch an die jeweilige Hörsituation an.

Ihre Hörgeräte verfügen möglicherweise auch über verschiedene Hörprogramme, mit denen Sie den Klang bei Bedarf verändern können. Auf Wunsch kann ein Signal beim Wechsel des Hörprogramms ertönen.

- ▶ Um das Hörprogramm zu wechseln, drücken Sie kurz den Wipptaster.

Schlagen Sie im Kapitel „Bedienelemente“ Ihre Einstellungen des Wipptasters nach. Im Kapitel „Hörprogramme“ finden Sie eine Liste Ihrer Hörprogramme.

Die Standard-Lautstärke wird verwendet.

Zusätzliche Einstellungen (optional)

Mit den Bedienelementen Ihrer Hörsysteme können Sie auch andere Einstellungen vornehmen, beispielsweise die Lautstärke des Tinnitus-Therapie-Signals einstellen.

Schlagen Sie im Kapitel „Bedienelemente“ Ihre Einstellungen der Bedienelemente nach.

Besondere Hörsituationen

Telefonieren

Halten Sie beim Telefonieren den Telefonhörer leicht oberhalb des Ohrs. Der Telefonhörer muss auf das Hörsystem ausgerichtet sein. Drehen Sie den Telefonhörer etwas, sodass das Ohr nicht vollständig vom Telefonhörer verdeckt wird.



Telefonprogramm

Wenn Sie beim Telefonieren eine bestimmte Lautstärkeeinstellung bevorzugen, bitten Sie Ihren Hörakustiker, ein spezielles Telefonprogramm einzurichten.

- ▶ Wechseln Sie in das Telefonprogramm, wenn Sie telefonieren.

Wenn für Ihre Hörsysteme ein Telefonprogramm eingerichtet wurde, ist dies im Kapitel „Hörprogramme“ angegeben.

Audiostreaming

Die folgenden Informationen zum Audiostreaming gelten **nicht** für alle Modelle des Hörsystems. Bitten Sie Ihren Hörakustiker, jene Funktionen zu markieren, die für Ihr Hörsystem zur Verfügung stehen.

Audioübertragung mit dem iPhone

Ihre Hörsysteme sind Made for iPhone-Hörsysteme. Das bedeutet, dass Sie Telefonanrufe oder Musik von Ihrem iPhone direkt in Ihre Hörsysteme übertragen können.

Für Informationen über die kompatiblen iOS-Geräte, zum Pairing, zur Audioübertragung und zu weiteren nützlichen Funktionen fragen Sie Ihren Hörakustiker.

Audioübertragung mit dem Android-Smartphone

Wenn Ihr Mobiltelefon Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) unterstützt, können Sie Telefonanrufe oder Musik von Ihrem Mobiltelefon direkt in Ihre Hörsysteme übertragen.

Weiterführende Informationen über die kompatiblen Android-Geräte, zum Pairing, zur Audioübertragung und zu weiteren nützlichen Funktionen erhalten Sie von Ihrem Hörakustiker.

Bluetooth

Ihr Gerät ist mit einer drahtlosen Bluetooth®*-Technologie ausgestattet, die eine einfache Audioübertragung von Handys oder anderen kompatiblen Geräten ermöglicht.

Im Flugzeug kann die Nutzung der Bluetooth-Funktion möglicherweise eingeschränkt sein, insbesondere beim Start und bei der Landung. Wenn dies der Fall ist, können Sie die drahtlose Bluetooth-Technologie in Ihrem Gerät über die Smartphone-App ausschalten.

* Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch WS Audiology Denmark A/S in Verbindung mit dem Produkt unterliegt einer Lizenzvereinbarung. Andere ausgewiesene Markennamen und Handelsmarken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Induktive Höranlagen (optional)

Manche Telefone und öffentlichen Einrichtungen, wie etwa Theater, nutzen eine Induktionsschleife bzw. eine induktive Höranlage, um das gewünschte Audiosignal (Musik und Sprache) zu übertragen. Mit diesem System können Ihre Hörsysteme das gewünschte Signal direkt empfangen – ohne störende Geräusche aus der Umgebung.

Gewöhnlich wird auf induktive Höranlagen durch Schilder oder Symbole hingewiesen.



Wenn Sie an einem Ort mit induktiver Höranlage sind:

- ▶ Wechseln Sie in das Telefonspulenprogramm.

Wenn für Ihre Hörsysteme ein Telefonspulenprogramm eingerichtet wurde, ist dieses im Abschnitt „Hörprogramme“ aufgeführt.

Wartung und Pflege

Um Schäden zu vermeiden, ist es wichtig, dass Sie Ihre Hörsysteme pfleglich behandeln und einige Grundregeln beachten, die Ihnen schnell zur täglichen Gewohnheit werden.

Hörsysteme

Trocknen und Aufbewahren

- ▶ Trocknen Sie Ihre Hörsysteme über Nacht.
- ▶ Wenn Sie die Hörsysteme längere Zeit nicht tragen, lagern Sie diese mit geöffnetem Batteriefach und entfernten Batterien in einer trockenen Umgebung.
- ▶ Bitten Sie Ihren Hörakustiker um weitere Informationen.

Reinigen

Ihre Hörsysteme haben eine Schutzbeschichtung. Sie müssen Ihre Hörsysteme trotzdem regelmäßig reinigen, um eine Beschädigung der Hörsysteme und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.

- ▶ Reinigen Sie Ihre Hörsysteme täglich mit einem weichen, trockenen Papiertuch.

- ▶ Verwenden Sie nie fließendes Wasser und tauchen Sie die Geräte nicht in Wasser.
- ▶ Üben Sie beim Reinigen niemals Druck aus.
- ▶ Fragen Sie Ihren Hörakustiker nach Empfehlungen für Reinigungsmittel und Pflegezubehör sowie weiteren Informationen, um Ihre Hörsysteme in gutem Zustand zu halten.



Ohrstücke und Schläuche


Auf den Ohrstücken kann sich Cerumen (Ohrenschmalz) ansammeln. Dadurch kann die Klangqualität beeinträchtigt werden.

- Für Hörsysteme mit einem Standardschlauch:
Reinigen Sie die Außenseite der Schläuche täglich mit einem Papiertuch, um Ablagerungen zu entfernen.
Die Schläuche sollten ausgetauscht werden, wenn Sie eine Beschädigung oder Verfärbung feststellen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol oder scharfe Chemikalien enthalten, da dies die Schläuche beschädigen kann.
- Für Hörsysteme mit einem Tragehaken:
Reinigen Sie die Ohrstücke täglich.
Bitten Sie Ihren Hörakustiker, die Schläuche zu reinigen oder die Ohrstücke und Schläuche bei Bedarf auszutauschen.

Ohrstücke reinigen

- ▶ Reinigen Sie die Ohrstücke täglich mit einem Papiertuch, um angesammeltes Ohrenschmalz zu entfernen.


Tauschen Sie die Ohrstücke aus, wenn sie Anzeichen einer Beschädigung aufweisen oder sich nicht mehr zufriedenstellend reinigen lassen.

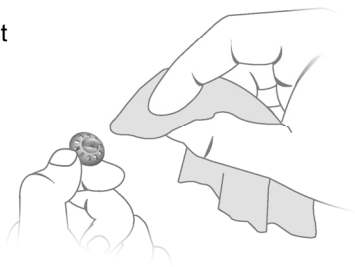

- ▶ Verwenden Sie nie fließendes Wasser und tauchen Sie das Ohrstück nicht in Wasser.

Standard-Ohrstücke auswechseln

- ▶ Ziehen Sie das gebrauchte Ohrstück ab und befestigen Sie das neue Ohrstück.

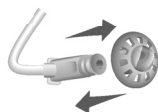



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

- ▶ Tragen Sie den Schlauch immer mit einem Ohrstück.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Ohrstück richtig befestigt ist.

Standard-Schläuche auswechseln

- ▶ Schrauben Sie den gebrauchten Schlauch vom Hörsystem ab.



- ▶ Schrauben Sie den neuen Schlauch auf.



Professionelle Wartung

Ihr Hörakustiker kann Ihre Hörsysteme gründlich und professionell reinigen und warten.

Maßgefertigte Ohrstücke und Wachsfilter sollten bei Bedarf von einer Fachkraft ausgewechselt werden.

Fragen Sie Ihren Hörakustiker, welche Wartungsabstände für Sie empfehlenswert sind.

Weitere Informationen

Sicherheitshinweise

Weitere Sicherheitshinweise finden Sie im Sicherheitshandbuch, das im Lieferumfang enthalten ist.

Zubehör

Sie können eine Smartphone App für die Fernsteuerung Ihres Hörsystems verwenden (verfügbar in vielen Ländern). Diese App ermöglicht Ihnen die Einstellung Ihres Hörsystems von Ihrem Smartphone und sogar die Personalisierung Ihrer Hörerfahrung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Hörakustiker.

Erklärung der Symbole



Weist auf eine Situation hin, die zu schweren, mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.



Weist auf mögliche Sachschäden hin.



Ratschläge, Tipps und nützliche Informationen.



CE-Konformitätskennzeichnung: Bestätigt die Übereinstimmung mit bestimmten Europäischen Richtlinien. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Konformitätsinformationen“.



Hersteller des Gerätes.

Made for

 iPhone | iPad

Die Verwendung des Logos Made for Apple bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für die Verbindung mit den Apple Produkten entwickelt wurde, die auf dem Logo genannt werden. Zudem hat der Entwickler eine Zertifizierung durchgeführt, um die Leistungsstandards von Apple zu erfüllen. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Gerätes oder die Einhaltung von Sicherheitsstandards und gesetzlichen Standards.

Betriebs-, Transport- und Lagerbedingungen

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 bis 50 °C 32 bis 122 °F
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 93 %

Während Transport und Lagerung sollten folgende Wertebereiche nicht für längere Zeit verlassen werden:

	Lagerung	Transport
Temperatur	10 bis 40 °C 50 bis 104 °F	-20 bis 60 °C -4 bis 140 °F
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 80 %	5 bis 90 %

Für andere Teile, z. B. für Batterien, können andere Werte gelten.

Problembehandlung

Problem und Lösungsmöglichkeiten

Der Ton ist schwach.

- Erhöhen Sie die Lautstärke.
 - Wechseln Sie die leere Batterie aus.
 - Reinigen Sie das Ohrstück oder wechseln Sie es aus.
-

Problem und Lösungsmöglichkeiten

Aus dem Hörsystem ertönen Pfeiftöne.

- Setzen Sie das Ohrstück erneut ein, bis es fest sitzt.
 - Verringern Sie die Lautstärke.
 - Reinigen Sie das Ohrstück oder wechseln Sie es aus.
-

Der Ton ist verzerrt.

- Verringern Sie die Lautstärke.
 - Wechseln Sie die leere Batterie aus.
 - Reinigen Sie das Ohrstück oder wechseln Sie es aus.
-

Signaltöne ertönen aus dem Hörsystem

- Wechseln Sie die leere Batterie aus.
-

Hörsystem funktioniert nicht.

- Schalten Sie das Hörsystem ein.
 - Schließen Sie das Batteriefach vorsichtig und vollständig.
 - Wechseln Sie die leere Batterie aus.
 - Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt wurde.
 - Die Einschaltverzögerung ist aktiviert. Warten Sie einige Sekunden und prüfen Sie erneut.
-

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.

Landesspezifische Information

USA und Kanada

Information zur Zertifizierung der Hörsysteme mit drahtloser Funktionalität:

Intuis M 4

- HVIN: RFM007
- Enthält FCC ID: 2AXDT-RFM007
- Enthält IC: 26428-RFM007

Intuis P 4

- HVIN: RFM006
- Enthält FCC ID: 2AXDT-RFM006
- Enthält IC: 26428-RFM006

Service und Gewährleistung

Seriennummern

Links:

Rechts:

Service-Termine

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Gewährleistung

Kaufdatum:

Gewährleistungsdauer in Monaten:

Ihr Hörakustiker

 **Hersteller**

WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngø
Dänemark

Document No. 05162-99T02 DE
Order/Item No. 210 256 48
Master Rev05, 08.2024
www.wsaud.com
© 08.2024, WSAUD A/S. All rights reserved


0123

www.signia.net