


LEITFADEN MOMENT DEMO-HÖRSYSTEME - PROGRAMMIERUNG MIT NOAHLINK WIRELESS

Unter COMPASS GPS 4.2 kann es mit der NoahLink Wireless (NLW) zu einer fehlerhaften Auslesung der Technologiestufe in DEMO-Geräten kommen. Um dies zu umgehen, empfehlen wir für die DEMO-Programmierung die Verwendung unserer ProLink Programmierschnittstelle. Sollte eine NLW zum Einsatz kommen, berücksichtigen Sie bitte die hier aufgeführten Hinweise, um eine korrekte Programmierung der DEMO-Hörsysteme sicherstellen zu können.

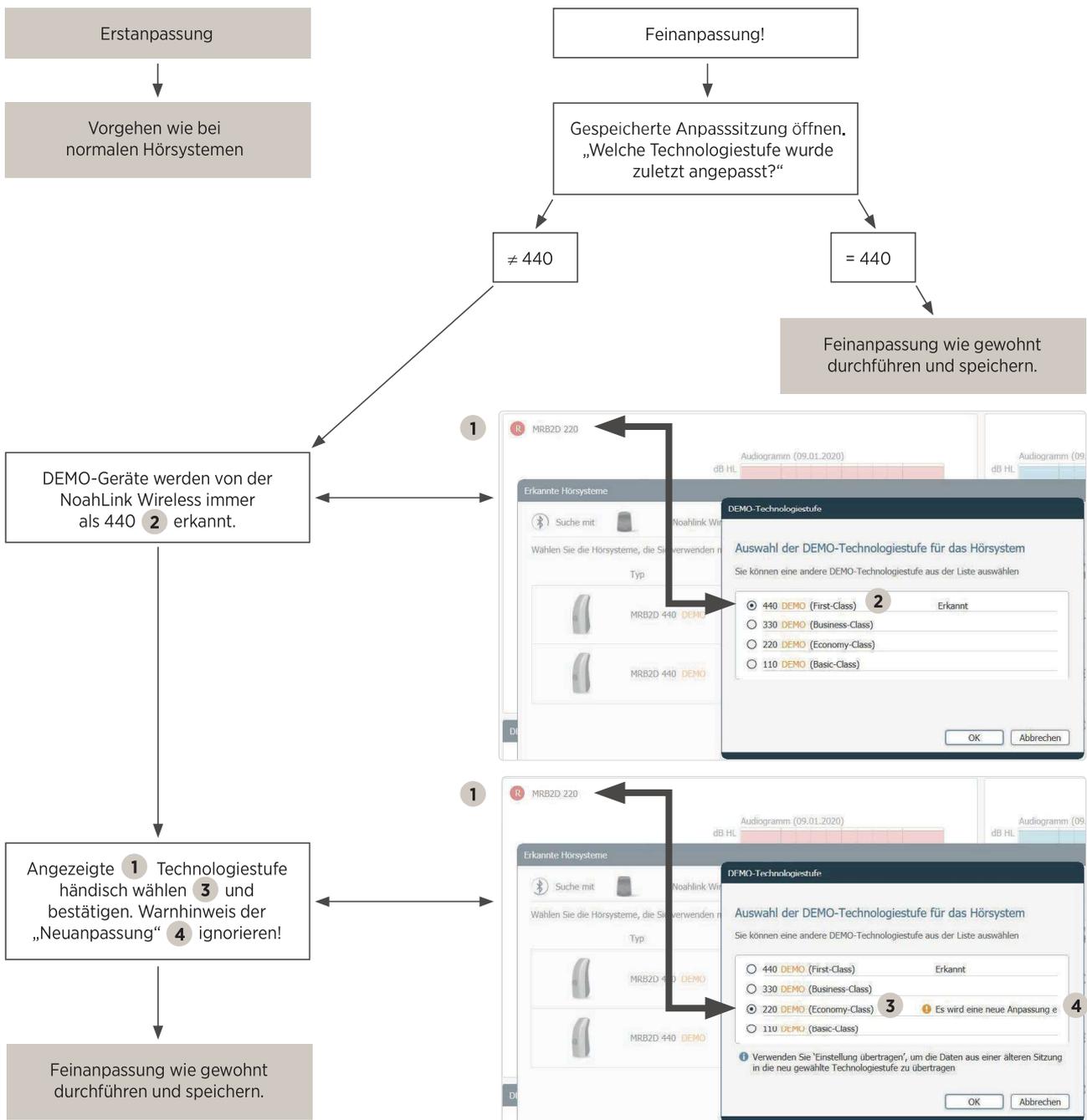

Die Nutzung der Funktion „Einstellung übertragen“ in der Kombination NoahLink Wireless/DEMO ist momentan nicht möglich. Bitte nutzen sie hierzu wie gewohnt die ProLink, USB-Link oder NearCom.